

Användarmanual



Touch Memo

120131


Innehållsförteckning

1	PACKA UPP	2
2	KOM IGÅNG	3
2.1	Spela in ett meddelande till en etikett	3
2.2	Lyssna på en inspelad etikett	3
3	BESKRIVNING AV TOUCH MEMO	4
3.1	Ovansidan	4
3.2	Undersidan	5
4	ANVÄNDNING	6
4.1	Slå på Touch Memo	6
4.2	Ladda batterierna	6
4.3	Användning av etiketterna	6
4.3.1	Taktila och enkla etiketter	6
4.3.2	Tvättbara etiketter	7
4.3.3	Fler etiketter	7
4.4	Spela in ett meddelande till en etikett	7
4.5	Spela över en tidigare inspelning	8
4.6	Spela upp ett meddelande	8
4.7	Radera ett meddelande	8
4.8	Säkerhetskopiera meddelanden	9
5	FELSÖKNING	10
5.1	Touch Memo startar inte	10
5.2	Inget ljud när etiketter skall läsas	10
5.3	Det går inte att spela in meddelanden	11
5.4	Meddelanden kan inte raderas	11
5.5	Batteriet laddas inte	11
6	LYSDIODENS SIGNALER	12
7	SPECIFIKATIONER	13

1 Packa upp

En leverans av Touch Memo innehåller:

- Touch Memo
- Laddare med USB-anslutning
- USB-kabel
- Halsrem
- 120 st taktila etiketter
- 40 st enkla etiketter
- 60 st tvättbara etiketter
- 24 st plasthållare för etiketter med fästögla (kan sys fast på kläder)

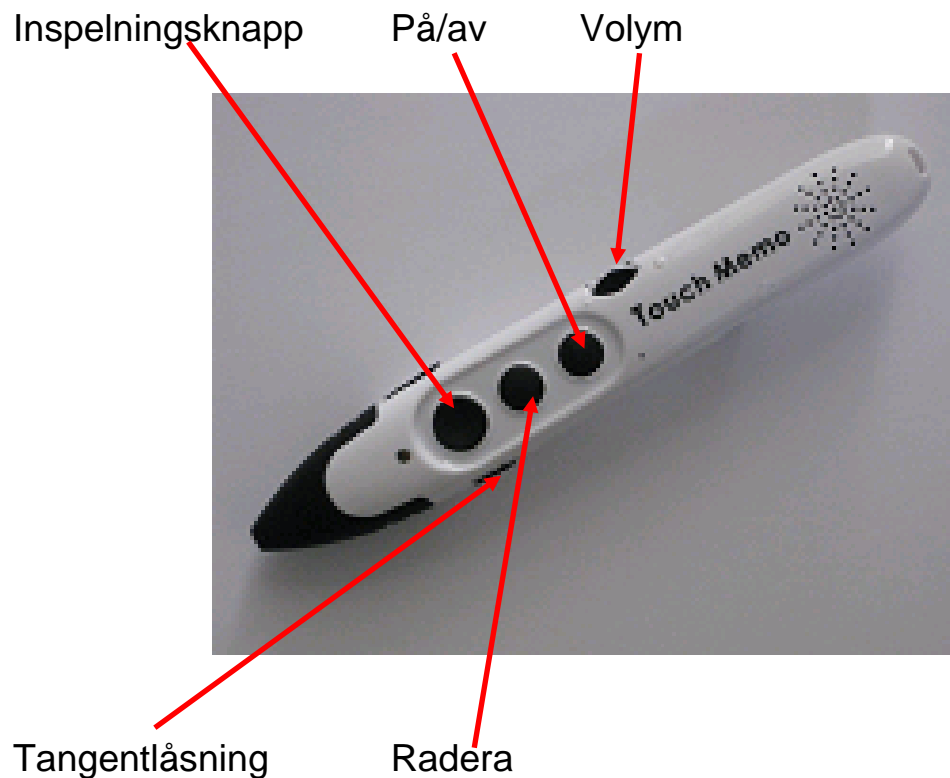

2 Kom igång

2.1 Spela in ett meddelande till en etikett

- Håll Touch Memo så att spetsen pekar neråt.
- Se till att tangentlåsningsen är avslagen (uppåt).
- Slå på Touch Memo genom att trycka länge på På/av, knappen längst upp med en taktill markering, tills ett startljud hörs.
- Tryck och håll inne inspelningsknappen, knappen längst fram på Touch Memo.
 - För spetsen av Touch Memo mot etiketten tills en ljudsignal hörs.
 - För Touch Memo mot dig och läs in meddelandet.
 - Släpp inspelningsknappen när meddelandet är klart.
 - Det inspelade meddelandet läses upp.

2.2 Lyssna på en inspelad etikett

- Se till att tangentlåsningsen är avslagen (uppåt).
- Slå på Touch Memo genom att trycka länge på På/av, knappen längst upp med en taktill markering, tills ett startljud hörs.
- För spetsen av Touch Memo mot etiketten.
- Meddelandet läses upp.

Observera att om Touch Memo förs mot en etikett som inte är inspelad så kommer en ljussignal.

3 Beskrivning av Touch Memo

3.1 Ovansidan

Längst upp finns en ögla där halsremmen kan fästas. Närmast under öglan finns högtalaren, hålen känns som ett mönster i höljet. Lite längre ner på den högra sidan finns en taktil markering ovanför en kontakt. Det är ett uttag för hörlurar. Strax under hörlursuttaget finns ytterligare en kontakt. Det är ett uttag för extern mikrofon.

Ytterligare lite neråt, fast på vänster, sida finns en taktil markering. Just nedanför den markeringen finns ratt för att ändra ljudvolym. Nedanför volmkontrollen finns ytterligare en taktil markering, fast mindre.

Mitt emot volymkontrollen, alltså på vänstra sidan sitter mikrofonen. Mikrofonen har ett hål i höljet, men det går knappt att känna.

Vid den mindre taktila markering under volymkontrollen börjar kontrollpanelen som består av tre knappar. Den översta som har en taktil markering på sig är **på/av**. Nästa är **radera** och den tredje är **inspelningsknappen**.

På höger sida, vid inspelningsknappen, finns **tangentlåset**. På båda sidor om reglaget finns taktila markeringar. Om reglaget för tangentlåsnings förs uppåt, mot den större taktila markeringen, så är knapparna öppna. Förs den neråt mot den mindre taktila markeringen så är knapparna låsta.

På vänstra sidan om inspelningsknappen finns en liten lucka av gummi som döljer USB-kontakten. Den används dels för att ladda batteriet och dels om inspelningarna skall sparas på dator.

Nedanför inspelningsknappen finns en lysdiod som lyser blått när Touch Memo är påslagen och när den laddas. Under inspelning lyser den rött.

Längst ner, den ända av Touch Memo som är tillverkad av ett svart antiglid-material, sitter "ögat", den sensor som läser av etiketterna. Se till att det inte hamnar smuts i hålet in till sensorn.

3.2 Undersidan

På undersidan finns inget som används vid dagligt bruk. Det finns en lucka för batterierna som sitter fast med en liten skruv. Öppna inte den!

4 Användning

4.1 Slå på Touch Memo

1. För att det skall vara möjligt att använda Touch Memo måste tangentlåsningsknappen slås av. Det görs genom att föra tangentlåsningsknappen uppåt, mot den ändan där halsremmen sitter fast.
2. Tryck och håll inne på/av i c:a 1 sekund. Ett startljud hörs.
3. Justera volymen, uppåt för högre volym, neråt för lägre volym.

Touch Memo stänger av sig själv efter 2-3 minuter om ingen knapp har tryckts. En avstängningssignal hörs när Touch Memo slås av.

4.2 Ladda batterierna

En ljudsignal hörs när batterierna behöver laddas. De laddas antingen med den USB-laddare som medföljer eller genom att koppla Touch Memo till en USB-port på en dator.

1. Se till att tangentlåsningsknappen är avslagen (knappen uppåt).
2. Anslut USB-kabeln till uttaget på vänstra sidan av Touch Memo, dolt av ett gummilock. Anslut andra ändan av kabeln till den medföljande USB-laddaren och anslut den till ett vägguttag.
3. Under laddning visar lysdioden grönt och blått ljus. När laddningen är klar lyser den blått.

Observera att Touch Memo inte kan användas under laddningen.

4.3 Användning av etiketterna

4.3.1 Taktila och enkla etiketter

Dessa etiketter kan fästas på de flesta underlag (passar även i frysboxen).

Några tips:

- Om man önskar att återanvända etiketter kan de medföljande plasthållarna med fördel användas. Fäst etiketten på hållaren och fäst hållaren med t.ex. ett gummiband i det hål som finns
- Om man önskar att ha samma meddelande på flera ställen kan etiketterna delas.
- Etiketterna kan bli oläsbara om de utsätts för mycket vatten.
- Använd de enkla etiketterna på CD-skivor. De taktila etiketterna kan skada CD-spelaren.

4.3.2 Tvättbara etiketter

De tvättbara etiketterna tål tvättmaskin, men inte torkrumlare och får ej strykas. De kan sys fast på kläder.

4.3.3 Fler etiketter

Det går att köpa fler etiketter från Polar Print.

Följande finns att köpa:

- Enkla etiketter, 400 st, (nummer 41-440) Pack A
- Enkla etiketter, 400 st, (nummer 441-840) Pack B
- Taktila etiketter, 240 st (nummer 121-360) Pack A
- Taktila etiketter, 240 st (nummer 361-600) Pack B
- Tvättbara etiketter med plastetiketter, 60 tvättbara + 24 återanvändbara plastetiketter

4.4 Spela in ett meddelande till en etikett

- Tryck och håll inne inspelningsknappen, den stora knappen längst fram på Touch Memo.
- Fortsätt att hålla knappen intryckt och för spetsen av Touch Memo mot etiketten tills en ljudsignal hörs. När etiketten är igenkänd blinkar lysdioden med rött sken.
- Fortsätt att hålla inne knappen och för Touch Memo mot dig och prata in meddelandet. När det är klart för inspelning lyser lysdioden rött.
- Släpp inspelningsknappen när meddelandet är klart. En kort signal hörs och det inspelade meddelandet läses upp.

4.5 Spela över en tidigare inspelning

Det går att göra om inspelningsprocessen om man vill ha ett nytt meddelande till en etikett. Den enda skillnaden är att ljudsignalerna är lite annorlunda med c:a 2 sekunders paus för att markera att ett tidigare meddelande raderas.

Det går att avbryta ominspelning genom släppa inspelningsknappen före ljudsignalen har spelats klart. När ljudsignalen har spelats upp så är det tidigare meddelandet raderat och går inte att få tillbaka (om inte en säkerhetskopia har gjorts).

4.6 Spela upp ett meddelande

- Se till att tangentlåsningsen är avslagen (uppåt) och att Touch Memo är påslagen.
- För spetsen av Touch Memo mot etiketten. En ljudsignal bestående av två korta pip hörs och meddelandet läses upp, avslutat med ett kort pip.

Det går att avbryta uppläsning av ett meddelande genom att trycka på inspelningsknappen.

Observera att om Touch Memo förs mot en etikett som inte är inspelad så kommer en ljussignal som låter likt ett klockspel.

4.7 Radera ett meddelande

Det går att radera meddelanden på tre olika sätt:

1. Ett meddelande kan spelas över av ett nytt, se 4.5 ovan.
2. Ett meddelande kan raderas när det just spelats upp:
 - a. För Touch Memo mot etiketten så att meddelandet spelas upp

- b. Tryck och håll nere raderaknappen i c:a 2 sekunder när hela meddelandet lästs upp. Det hörs två ljudsignaler och lysdioden blinkar rött.
 - c. När ett kort pip hörs är raderingen klar och knappen kan släppas.
3. Ett meddelande kan raderas utan att ha tillgång till etiketten.
 - a. Om man trycker en gång på raderknappen så läses det först inspelade meddelande upp. Genom att trycka flera gånger på Radera så vandrar man mellan de meddelanden som finns. Meddelandena spelas upp i kronologisk ordning.
 - b. När det meddelande som skall raderas just spelats klart, en kort pip hörs när det är klart - tryck och håll inne raderaknappen.

4.8 Säkerhetskopiera meddelanden

Det går att kopiera de meddelanden som spelats in i en dator. Gör så här:

1. Anslut USB-kabeln till kontakten under gummilocket på den vänstra sidan av Touch Memo och till en USB-port på datorn.
2. Touch Memo visas som en enhet i datorn och meddelanden kan kopieras och sparas på vanligt sätt.

Vill man använda de säkerhetskopierade inspelningarna så kopieras de tillbaks till Touch Memo på samma sätt.

Lite kuriosita:

De inspelningar som görs sparas som WAV-filer (ett vanligt filformat för ljudfiler). Om man vill använda andra WAV-filer än de man spelat in med Touch Memo så är det möjligt att spara andra WAV-filer med samma filnamn som de inspelade och sen överföra dem till Touch Memo.

5 Felsökning

5.1 Touch Memo startar inte

Orsak	Åtgärd
Inte påslagen	Tryck och håll inne På/av i lite mer än en sekund
Tangentlåsningsen på	Slå av tangentlåsningsen genom att föra reglaget som sitter på högersidan uppåt (från spetsen)
Volymen är för låg	Öka volymen genom att vrida volymratten som sitter på den vänstra sidan uppåt.
Batteriet är urladdat	Ladda batteriet
Programmet har hängit sig	Slå på tangentlåsningsen och slå sen av den igen.

5.2 Inget ljud när etiketter skall läsas

Orsak	Åtgärd
Inte påslagen	Tryck och håll inne På/av i lite mer än en sekund
Volymen är för låg	Öka volymen genom att vrida volymratten som sitter på den vänstra sidan uppåt.
Batteriet är urladdat	Ladda batteriet
Programmet har hängit sig	Slå på tangentlåsningsen och slå sen av den igen.

5.3 Det går inte att spela in meddelanden

Orsak	Åtgärd
Inte påslagen	Tryck och håll inne På/av i lite mer än en sekund
Etikett inte igenkänd	Säkerställ att Touch Memo har känt igen en etikett före inspelning görs
Inspelningsknappen har inte tryckts korrekt	Inspelningsknappen måste vara intryckt under hela inspelningsprocessen.
Inspelningen gjordes för långt från mikrofonen	Mikrofonen sitter på mitten av Touch Memo. Inspelning bör göras inom c:a 10 cm från mikrofonen.
Programmet har hängit sig	Slå på tangentlåsningsen och slå sen av den igen.

5.4 Meddelanden kan inte raderas

Orsak	Åtgärd
Inte påslagen	Tryck och håll inne På/av i lite mer än en sekund
Raderingen avbröts	Raderingsknappen måste vara intryckt under hela raderingsprocessen.
Programmet har hängit sig	Slå på tangentlåsningsen och slå sen av den igen.

5.5 Batteriet laddas inte

Orsak	Åtgärd
Kabeln är inte rätt ansluten	Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till kontakten under gummilocket på Touch Memo och i USB-porten på laddaren.
Tangentlåsningsen på	Slå av tangentlåsningsen genom att föra reglaget som sitter på högersidan uppåt (från spetsen)
Programmet har hängit sig	Slå på tangentlåsningsen och slå sen av den igen.

6 Lysdiodens signaler

Signal	Färg
Påslagen	Fast blå
Inspelning	Fast röd
Uppspelning	Fast blå
Radering	Blinkande röd
Laddning	Fast blå och grön
Fulladdad	Fast blå

7 Specifikationer

Touch Memo
Internt minne 2 GB
Inspelningstid; över 83 timmar
Max uteffekt; 0,4 W
Ljudformat; WAVE
Storlek; 163 x 23 x 25 mm
Vikt; 45 gr
Användningstemperatur; 5 - 40 grader (C)
Batteri; Litiumjon 3,7 V 350 mA
Batteriets användningstemperatur; 5 - 35 grader (C)
Batteriet räcker för 6 timmars kontinuerlig användning
Ladningstid; 2 timmar
USB-laddare (V2.0 Mini B/Mini A) AC 110-249 V 50-60 Hz
Laddare ut DC 5 v (+/-0,5 V) 500 mA (+/-30 mA)



This product bears the CE and FCC approval mark and complies with the safety and EMC requirements of the following directives:

EN55022:2006+A1:2007: Class B

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

IEC61000-4-2:2008

IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010

IEC61000-4-8:2009

FCC Part 15 B and CISPR 22 Class B

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se
help@polarprint.se

Region nord

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ
Tel 0920-20 34 30
Fax 0920-878 86

Umeå

Tvistevägen 47C
907 36 UMEÅ
Tel 090-13 95 72
Fax 090-13 94 83

Region öst

Stockholm

Liljeholmsvägen 30
117 61 STOCKHOLM
Tel 08-442 42 70
Fax 08-442 42 79

Region väst

Göteborg

Aminogatan 34
431 53 MÖLNDAL
Tel 031-339 99 90
Fax 031-80 26 52

Region syd

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 MALMÖ
Tel 040-97 17 00
Fax 040-97 17 71

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 VÄXJÖ
Tel 0470-390 30