

## Användarmanual



Kom-igång  
VictorReader Stratus<sup>4</sup> H  
som taltidningsspelare  
Ver 131015

# Innehåll

<b>1</b>	<b>INLEDNING</b> .....	<b>2</b>
1.1	Hur få hjälp .....	2
1.2	Hur kommer tidningarna .....	2
1.3	Hur ser tidningarna ut.....	3
<b>2</b>	<b>LÄS EN TIDNING</b> .....	<b>4</b>
2.1	Beskrivning av knapparna .....	4
2.2	Starta taltidningsläsning .....	5
2.3	Några exempel på vad man kan göra när man läser en tidning.....	6
2.3.1	Välj nivå.....	6
2.3.2	Bokmärken .....	7
2.3.3	Gå till en bestämd sida i tidningen....	8
2.3.4	Radera en tidning.....	9

---

# 1 Inledning

---

## 1.1 Hur få hjälp

Om du behöver hjälp att hantera din taltidningsspelare eller om du vill anmäla fel på spelaren kontakta **Taltidningshjälpen**.

Ring **020 - 311 211**

Eller skriv till: [taltidningshjalpen@polarprint.se](mailto:taltidningshjalpen@polarprint.se)

Telefontider: 08:00-12:00, 13:00-16:00, måndag-fredag.

## 1.2 Hur kommer tidningarna

Innehållet i tidningarna kommer från tidningsföretagen och görs om till taltidningsformatet Daisy. Tidningen i Daisy-format skickas sedan ut direkt till spelarna via internet och läses upp av den talsyntes som finns i spelaren.

När spelaren slås på kommer den att leta efter nya tidningar. Det innebär att det tar lite tid innan apparaten är redo för uppspelning. Normalt börjar läsningen i den senast nerladdade tidningen. Om

det inte finns någon ny tidning börjar spelaren läsningen där den avslutades senast.

Ha spelaren ansluten till nätspänning när tidning skall laddas ner.

## **1.3 Hur ser tidningarna ut**

Alla tidningar börjar med en innehållsförteckning, sedan kommer själva tidningen.

Tidningarna är indelade i delar, artiklar och sidor.

Man kan välja om man vill hoppa mellan tidningens delar, artiklar eller sidor.

De flesta tidningar finns både i en fullversion och en kortversion. Ring taltidningshjälpen för att byta mellan versionerna.

---

## 2 Läs en tidning

---

### 2.1 Beskrivning av knapparna

I det övre vänstra hörnet sitter en rund högtalare. Bredvid den finns 3 dubbelknappar som används för att från vänster till höger öka (övre knappen) eller minska (nedre knappen) tonhöjd, volym och hastighet.

I utrymmet under högtalaren finns följande knappar, uppifrån och ner;

Titellista, bokmärken och mata ut CD-skiva.

Längst ner närmast dig, finns spola bakåt, start/stopp och spola framåt.

Ovanför dessa tre knappar finns en halvmånformad knapp som används för att ställa in automatisk avstängning.

Nedanföör dubbelknapparna finns fyra piltangenter som är placerade som i ett kors. Pil-vänster, pil-höger, pil-upp och pil-ner. Dessa navigationsknappar används för att flytta runt i tidningens struktur. I mitten av pilkorset sitter informationsknappen. Den är lite nedsänkt.

Mot spelarens högerkant sitter på/av-knappen. Även den är lite nedsänkt.

På spelarens högerkant finns, uppifrån och ner ett uttag för SD-kort, ett uttag för usb, och ett hörlursuttag. På spelarens baksida finns ett uttag för strömadapter.

Det går att sätta på ett överlägg som täcker en del knappar för att göra spelaren lättare att hantera.

## **2.2 Starta taltidningsläsning**

Slå på spelaren genom att trycka in "Slå på/av". Håll knappen intryckt tills du hör ett pip. Efter en paus säger spelaren "Välkommen till Victor Reader". Efter det följer ytterligare en paus. Så säger spelaren "vänta". Därefter letar den efter nätverket. När den har fått kontakt får du ett besked om att spelaren är ansluten och nerladdningen börjar. När nerladdningen är klar talar spelaren om hur många tidningar som har laddats ner. Därefter läses namnet upp på den tidning som du prenumererar på. Notera att det oftast är den nyaste tidningen som läses upp.

Apparaten börjar automatiskt läsa upp tidningen utan att du behöver trycka på någon knapp.

Det går när som helst att stoppa uppläsningen genom att trycka på Start/stopp. Samma knapp används för att återstarta uppspelning.

För att byta tidning, tryck på knappen titellista. Tryck därefter på pil-vänster (föregående) och pil-höger (nästa) tills du kommer till önskad tidning. När rätt tidning läses, välj den genom att trycka på Start/stopp.

## **2.3 Några exempel på vad man kan göra när man läser en tidning**

Nedanstående beskrivning är inte fullständig. För ytterligare information hänvisas till den fullständiga användarmanualen till spelaren Victor Stratus 4 H.

### *2.3.1 Välj nivå*

Med pil-upp och pil-ner kan man välja hur man vill flytta sig i tidningens olika nivåer. När önskad nivå valts används pil-vänster (föregående) och pil-höger (nästa) för att hoppa i tidningen.

I dagstidningarna finns följande nivåer att välja mellan:

- Nivå 1, del av tidningen. Det är de delarna som står i innehållsförteckningen i början av tidningen
- Nivå 2, artiklar
- Sida
- Fras
- rad
- mening
- ord
- bokstavera
- tecken

Exempel: Om du har valt att ställa dig på Sida så flyttar du dig en sida bakåt med pil-vänster och en sida framåt med pil-höger. Om du istället valt att ställa dig på Nivå 2 flyttar du dig med samma knappar (pil-vänster och pil-höger) mellan artiklarna i tidningen.

### 2.3.2 *Bokmärken*

Kanske läser du något som du tycker verkar särskilt intressant eller så stöter du på något som du vill komma ihåg och återvända till senare. I sådana sammanhang är bokmärkesfunktionen på spelaren värdefull.



För att lägga in ett bokmärke gör så här:

1. Se till att du står vid det stället i texten där bokmärket ska läggas in. För att vara riktigt säker på detta, backa en fras bakåt och stoppa när du hört frasen. Du är då där bokmärket ska börja.
2. Tryck på och håll inne knappen "Bokmärke". Släpp när apparaten säger bokmärke 1 inlagt". Nästa gång du lägger in ett bokmarke säger Spelaren "bokmärke 2 inlagt" osv.

Gå till ett bokmärke

Tryck på bokmärkesknappen en gång. Då kommer du till listan. Tryck pil vänster eller pil höger för att välja bokmärke.

### *2.3.3 Gå till en bestämd sida i tidningen*

Gör så här:

Tryck på pil-ner tills du kommer till sida. Gå med pil-vänster och pil-höger för att komma till rätt sidnummer.


Du kan också bläddra tio sidor framåt genom att hålla in knapp pil höger eller tio sidor bakåt genom att hålla in pil-vänster. Släpp knappen när du befinner dig på den sida du önskat.

I en dagstidning kan sidantalet variera dag från dag. Det kan även vara så att det, en speciell dag, inte finns något innehåll på en viss sida. Om en sida, som du försöker gå till, saknas går spelaren automatiskt vidare till nästa sida som innehåller text.

### 2.3.4 *Radera en tidning*

När du inte längre vill ha en tidning kvar, gör så här:

Tryck på knappen titellista. Välj den tidning du vill radera med hjälp av pil-vänster eller pil-höger. Därefter trycker du på och håller inne knappen "mata ut" tills du hör frågan "återlämna titel". Tryck sedan på start/stopp för att bekräfta. Då får du beskedet "raderad titel".

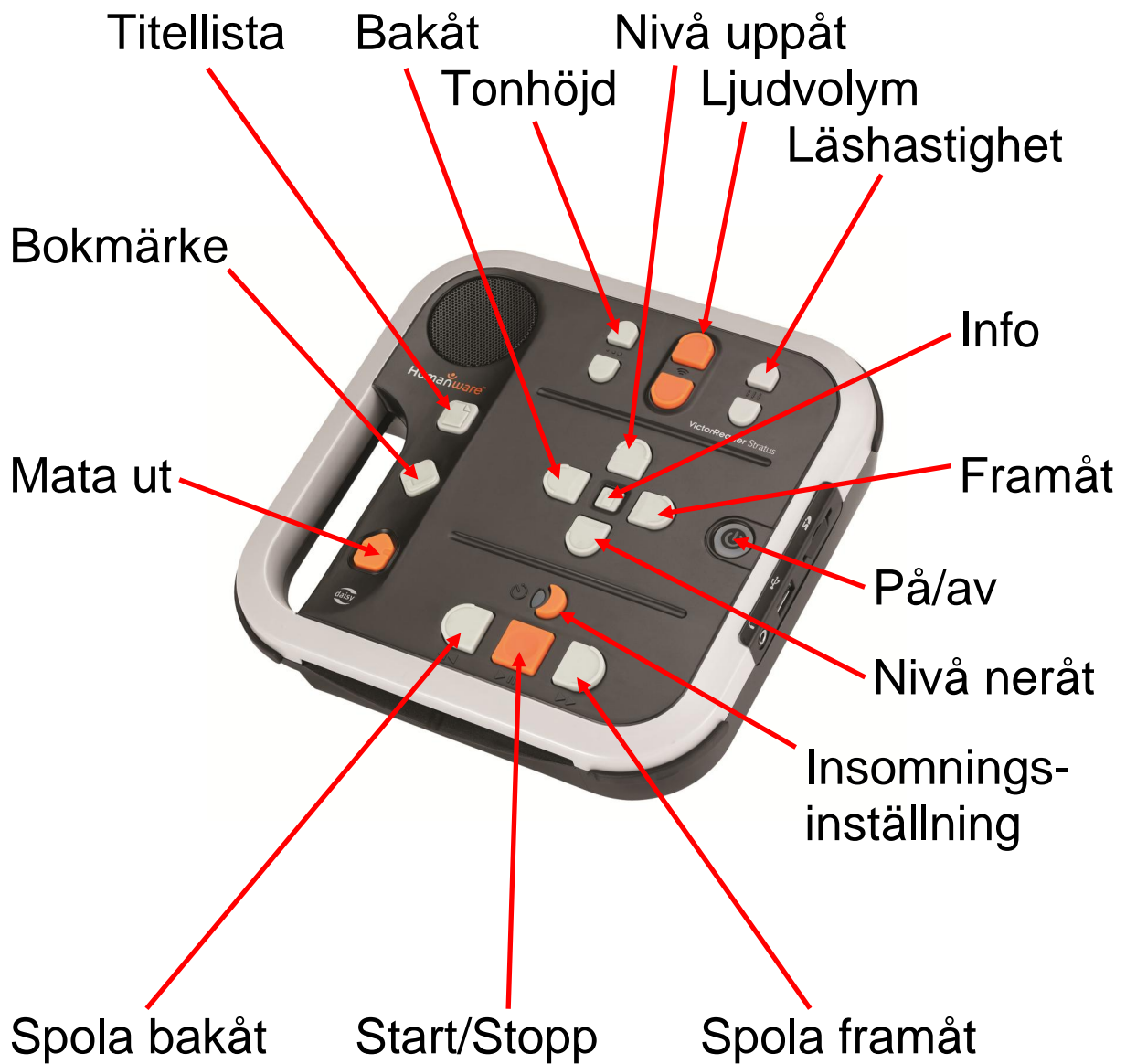

# Taltidningshjälpen

020 - 311 211

taltidningshjalpen@polarprint.se

## Polar Print

Teknisk hjälp och support  
Tel 020-82 69 13

Info@polarprint.se  
help@polarprint.se

## Region nord

### Huvudkontor, Luleå

Polar Print  
Box 950  
971 28 LULEÅ  
Tel 0920-20 34 30  
Fax 0920-878 86

### Umeå

Tvistevägen 47C  
907 36 UMEÅ  
Tel 090-13 95 72  
Fax 090-13 94 83

## Region öst

### Stockholm

Liljeholmsvägen 30  
117 61 STOCKHOLM  
Tel 08-442 42 70  
Fax 08-442 42 79

## Region väst

### Göteborg

Aminogatan 34  
431 53 MÖLNDAL  
Tel 031-339 99 90  
Fax 031-80 26 52

## Region syd

### Malmö

Gasverksgatan 2  
211 29 MALMÖ  
Tel 040-97 17 00  
Fax 040-97 17 71

### Växjö

Merkuriusvägen 3  
352 64 VÄXJÖ  
Tel 0470-390 30