

Kortmanual



CLEARREADER+
generation 2
20170425


Innehållsförteckning

| | |
|---|---|
| Introduktion | 1 |
| Lära känna din ClearReader+..... | 2 |
| Knappar och anslutningar..... | 3 |
| Komma igång..... | 3 |
| Förberedelse..... | 3 |
| Placera dokumentet..... | 4 |
| Starta ClearReader +..... | 4 |
| Standby-läge..... | 4 |
| Stänga av ClearReader+ | 4 |
| Läsa text | 4 |
| Läsa tabeller | 5 |
| Justera volymen..... | 5 |
| Justera läshastigheten | 5 |
| Starta eller pausa uppläsningen | 5 |
| Hoppa bakåt i texten..... | 5 |
| Hoppa framåt i texten | 6 |
| Hoppa till början av dokumentet | 6 |
| Välja språk och röst | 6 |
| Batteriet, status och uppladdning | 6 |

Introduktion

ClearReader+ är en mycket lättanvänd läsmaskin som kan användas för att på ett snabbt och enkelt sätt läsa upp texter som finns på papper, såsom brev, tidningar och böcker. Texten läses upp med en tydlig talsyntesröst. Tack vare det inbyggda batteriet så kan du läsa utan att apparaten är ansluten till ett vägguttag.

Lära känna din ClearReader+

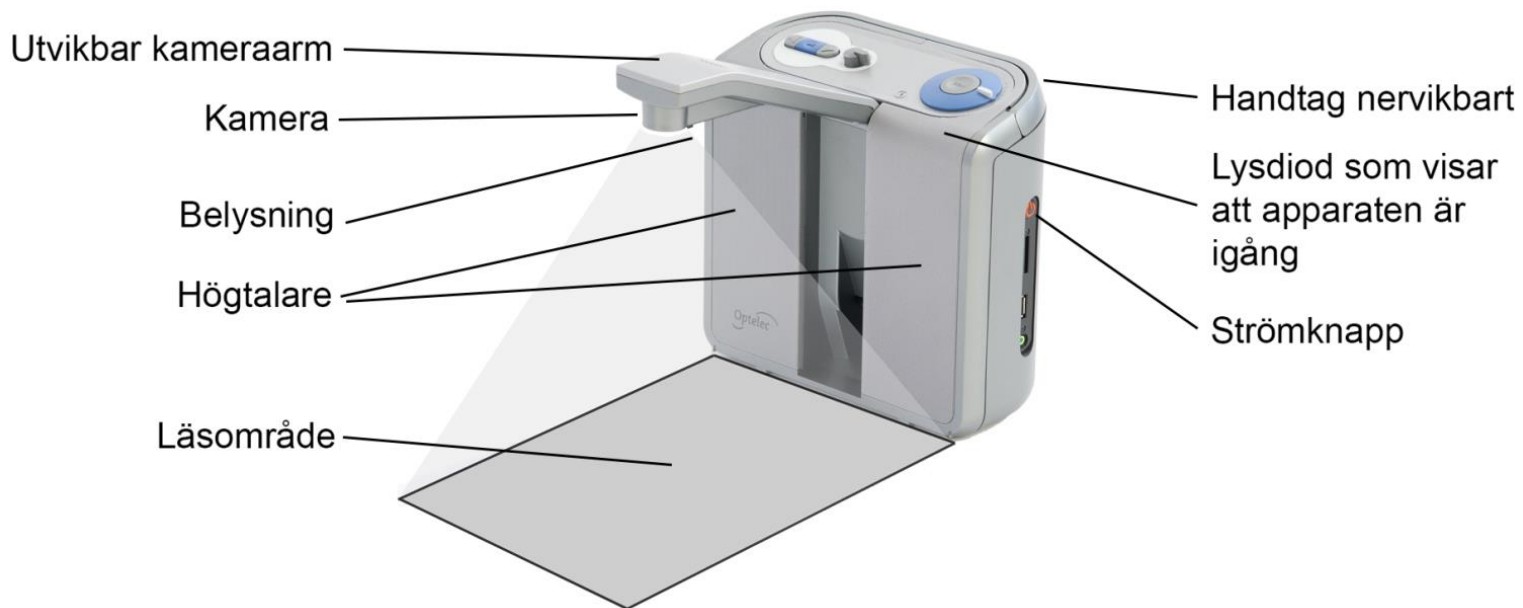

Utvikbar kameraarm Vik ut armen för att kunna läsa in en text.

Kamera För att kunna ta en bild av texten, placera pappret med texten framför ClearReader+. Det finns två taktila markeringar på framsidan som visar var dokumentet skall placeras. Storleken på papper som kan läsas in är ungefär A4.

Belysning När en bild skall tas tänds belysningen automatiskt för att ge tillräckligt ljus.

Högtalare Talsyntesen läser upp texten genom de inbyggda högtalarna (alternativt hörlurar anslutna till hörlursuttaget).

Handtag, vikbart Lyft upp handtaget och bär i det om ClearReader+ skall flyttas.

Lysdiod Lyser när apparaten är igång, blinkar om den är i standby-läge och är släckt när apparaten är avstängd.

Strömknapp Tryck på knappen för att starta och stänga av ClearReader+.

Knappar och anslutningar

Spela / Paus

Hastighetsinställning

Volyminställning



Bakåt

Framåt

Läs in

Strömknapp

Hörlursuttag

Anslutning för
nätadapter



Komma igång

Förberedelse

När ClearReader+ skall användas för första gången måste batteriet laddas. Det laddas genom att ansluta nätadaptern till kontakten på baksidan. Det tar ca tre timmar att ladda batteriet fullt, men det går att använda ClearReader+ under tiden laddning sker



Fälla upp kameran

Fäll upp kameraarmen genom att trycka lätt på den infällda armen tills du hör ett klick. Armen finns mellan de två högtalarna på apparatens framsida. Fäll tillbaka den genom att försiktigt trycka tillbaka den tills du hör ett klick igen.

Placera dokumentet

Placera pappret, tidningen eller boken framför ClearReader+.

Kameran läser in en yta som motsvarar en stående A4.

Det finns två taktila markeringar på framkanten av ClearReader+ som markerar bredden av det område som avläses.



Starta ClearReader +

Tryck på strömknappen på den högra kanten.

Uppstartsprocessen tar ungefär 40 sekunder. Under startproceduren hörs några pip följt av ett ljudmeddelande när allt är klart. Nu lyser lysdioden och ClearReader+ är klar för användning



Standby-läge

Genom att trycka ner och hålla inne knapparna Bakåt och Framåt i två sekunder så aktiveras standby-läget. Ett avstängningsljud hörs och lysdioden börjar blinka. För att starta ClearReader+ från standby trycker du på Strömknappen. Det tar ca 10 sekunder för ClearReader+ att vakna från standby-läget. Även i standby-läge så förbrukas energi, även om det är lite. Batteriet räcker till 40 timmars standby. Om batteriet tar slut i standby-läget så stängs apparaten av.



Stänga av ClearReader+

Tryck ner och håll inne Strömknappen för att stänga av apparaten helt. Ett avstängningsljud hörs och lysdioden slocknar.

Läsa text

Tryck på knappen Läs-in när texten är korrekt placerad. Belysningen tänds och efter någon sekund så hörs ett kameranljud. När bilden är

tagen hörs ett tickande så länge tolkningen pågår och sedan börjar ClearReader+ att läsa upp texten.

Läsa tabeller

Normalt läser ClearReader+ texten kolumnvis, så att exempelvis text i en tidning läses korrekt. Om du vill läsa en tabell, eller t ex en räkning vill du istället läsa tvärs över pappret. För att tvinga ClearReader+ att göra detta – tryck ner och håll inne knappen Läs-in i två sekunder tills ett klick-ljud hörs.

Justera volymen

Vrid volymreglaget medurs för att öka volymen och vrid det moturs för att minska den. Reglaget fjädrar tillbaka, så för att ändra volymen mycket måste flera vridningar göras. Ett alternativ är att hålla reglaget i något av ändlägena för att snabbt höja eller sänka volymen.



Justera läshastigheten

Vrid hastighetsreglaget medurs för att öka hastigheten och vrid det moturs för att minska den. Reglaget fjädrar tillbaka, så för att ändra hastigheten mycket måste flera vridningar göras. Ett alternativ är att hålla reglaget i något av ändlägena för att snabbt höja eller sänka hastigheten.



Starta eller pausa uppläsningen

Uppspelningen startar automatiskt efter att du har tryckt på knappen Läs-in och texten har tolkats. För att göra paus i uppläsningen tryck på knappen Spela / Paus. Tryck på samma knapp för att återuppta uppläsningen.

Hoppa bakåt i texten

För att hoppa bakåt i den text som läses upp, tryck på knappen Bakåt. En kort tryckning hoppar tillbaka ett ord. För att hoppa en mening tillbaka, håll inne knappen i två sekunder.

Hoppa framåt i texten

För att hoppa framåt i den text som läses upp, tryck på knappen Framåt. En kort tryckning hoppar ett ord framåt. För att hoppa en mening framåt, håll inne knappen i två sekunder.

Hoppa till början av dokumentet

För att hoppa till början av dokumentet, tryck ner knapparna Bakåt och Spela / Paus samtidigt.

Välja språk och röst

Tryck och håll nere knappen Bakåt och vrid samtidigt på Hastighetsvredet för att välja nästa röst. För att läsningen skall bli bra bör talsyntesens språk överensstämma med språket i texten på pappret som skall läsas.

OBS. Om automatiskt språkbyte har valts så används knappen bara för att välja mellan de röster som finns för det automatiskt valda språket. Skall menyspråk ändras måste automatiskt språkbyte stängas av först.

Batteriet, status och uppladdning

Tryck samtidigt på knapparna Framåt och Bakåt för att kontrollera batteriets laddningsstatus. 100% betyder att batteriet är fulladdat.

Ladda batteriet med den medföljande nätadaptern om batterinivån är låg. Anslut adaptorn till nätström och till laddningsuttaget på baksidan (nedre vänstra hörnet) av ClearReader+.

Att ladda batteriet tar ungefär 3 timmar. Ett fulladdat batteri räcker till ungefär 5 timmars kontinuerlig användning.

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Box 950
971 28 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Rosterigränd 14
117 61 STOCKHOLM

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Merkuriusvägen 3
352 64 Växjö