

Användarmanual



BRAILLIANT BI 40X

20220517

Copyright 2022. Alla rättigheter förbehållna, HumanWare.

Denna användarmanual är skyddad av upphovsrätt som tillhör HumanWare, med alla rättigheter förbehållna. Denna användarmanual får inte kopieras i delar eller till sin helhet, utan skriftlig tillåtelse av HumanWare.

Innehåll

1.	Kom igång.....	7
1.1.	Innehåll i förpackningen.....	7
1.2.	Överblick av Brailiant BI 40X	7
1.2.1.	Ovansidan	7
1.2.2.	Framkanten	8
1.2.3.	Vänstra kanten.....	8
1.2.4.	Högra kanten.....	8
1.2.5.	Undersidan.....	8
1.3.	Ladda Brailiant BI 40X.....	8
1.4.	Slå på och av.....	9
1.5.	Justera strömsparläge	10
1.6.	Menyn Om.....	10
1.7.	Aktivera huvudmenyn	10
2.	Navigering samt användning av menyer	10
2.1.	Navigera i Huvudmenyn	10
2.2.	Förflytta läsraden till höger/vänster	11
2.3.	Använda snabbmenyn för ytterligare funktioner	11
2.4.	Navigering via första bokstaven i ord	11
2.5.	Använda snabbkommandon/Knappkombinationer för att navigera	12
3.	Använda Ordbehandlaren.....	13
3.1.	Skapa en fil	13
3.2.	Öppna en fil	13
3.3.	Senast sparade	13
3.4.	Stänga en fil.....	14
3.5.	Spara en textfil	14
3.6.	Automatisk rullning i skriven text i Ordbehandlaren.....	14

3.6.1.	Ändra hastighet för Automatisk rullning	14
3.7.	Söka text i en fil	14
3.7.1.	Söka och ersätta text	14
3.8.	Klippa ut, kopiera och klistra in text.....	15
3.9.	Använda läsläge.....	15
3.10.	Infoga datum och tid	16
3.11.	Infoga, navigera till samt ta bort bokmärken.....	16
3.11.1.	Infoga ett bokmärke.....	16
3.11.2.	Navigera till bokmärke	16
3.11.3.	Ta bort bokmärke.....	17
3.12.	Aktivera dokumentsymboler	17
3.13.	Tabell med kommandon för Ordbehandlaren	17
4.	Använda Punktordbehandlaren.....	19
4.1.	Skapa en fil	19
4.2.	Öppna en fil	19
4.3.	Senast sparade	19
4.4.	Stänga en fil.....	19
4.5.	Spara en punktfil	20
4.6.	Exportera en punktfil till text	20
4.7.	Använda automatisk rullning i Punktordbehandlaren.....	20
4.7.1.	Ändra hastighet för Automatisk rullning	20
4.8.	Söka text i en fil	21
4.8.1.	Söka och ersätta text	21
4.9.	Klippa ut, kopiera och klistra in text.....	21
4.10.	Använda läsläge.....	22
4.11.	Infoga, navigera till samt ta bort bokmärken.....	22
4.11.1.	Infoga ett bokmärke.....	22
4.11.2.	Navigera till bokmärke	22
4.11.3.	Ta bort bokmärke.....	22
4.12.	Aktivera dokumentsymboler	23
4.13.	Tabell med kommandon för Punktordbehandlaren	23

5.	Använda Victor Reader	24
5.1.	Navigera i boklistan	25
5.1.1.	Söka efter böcker	25
5.1.2.	Visa senast öppnade böcker	25
5.1.3.	Hantera dina böcker	25
5.2.	Navigering och ytterligare information om böcker	26
5.2.1.	Ändra navigationsnivå i böcker.....	26
5.2.2.	Navigera efter sida, rubrik, procent eller bokmärken	26
5.2.3.	Automatisk rullning i textböcker i appen Victor Reader	27
5.2.4.	Hitta aktuell position i en bok.....	27
5.2.5.	Navigera till början eller slutet av en bok.....	27
5.2.6.	Söka text i en textbok	27
5.2.7.	Visa ytterligare bokinformation.....	27
5.3.	Lägga till, navigera, markera och ta bort bokmärken	28
5.3.1.	Lägga in ett bokmärke	28
5.3.2.	Navigera till bokmärken.....	28
5.3.3.	Markerande bokmärken	28
5.3.4.	Visa markerande bokmärke	29
5.3.5.	Ta bort bokmärken	29
5.4.	Tabeller över kommandon och läskommandon för Victor Reader	29
6.	Använda Punktdisplayläget.....	32
6.1.	Aktivera och avsluta Punktdisplayläget	32
6.1.1.	Avgöra kompatibilitet med Brailiant BI 40X.....	32
6.1.2.	Väck en iOS-enhet med Brailiant	32
6.1.3.	Ansluta via USB	32
6.1.4.	Ansluta via Bluetooth.....	33
6.2.	Urklipp i punktdisplayläge	33
6.3.	Navigera mellan anslutna enheter	34
6.4.	USB-anlutningar i punktdisplayläge.....	34
6.5.	Inaktivera punkt tangentbord i punktdisplayläge.....	35
7.	Använda Filhanteraren	35

7.1.	Utforska filer.....	35
7.1.1.	Välj en enhet i Filhanteraren	35
7.1.2.	Visa information om filer, mappar eller enheter.....	36
7.1.3.	Visa aktuell sökväg för fil	36
7.1.4.	Sök filer och mappar	36
7.1.5.	Sortera filer och mappar	36
7.2.	Redigera filer och mappar	37
7.2.1.	Skapa en ny mapp.....	37
7.2.2.	Byt namn på filer eller mappar	37
7.2.3.	Kopiera, klippa ut och klistra in filer eller mappar.....	37
7.2.4.	Ta bort filer eller mappar	38
7.3.	Kommandotabell för Filhanteraren	38
8.	Använda Kalkylatorn	39
8.1.	Använda kalkylatorn.....	39
8.2.	Tabell kommandon för Kalkylatorn.....	39
9.	Använda funktionen för Datum och tid	39
9.1.	Visa datum och tid.....	40
9.2.	Ställa in datum och tid	40
10.	Inställningsmenyn	40
10.1.	Användaralternativ	41
10.2.	Lägga till, konfigurera och ta bort språkprofiler.....	42
10.2.1.	Lägga till en språkprofil	42
10.2.2.	Ändra eller ta bort en språkprofil.....	42
10.3.	Använda Wi-Fi eller Bluetooth	43
10.3.1.	Anslut till ett Wi-Fi-nätverk.	43
10.3.2.	Tabell med inställningar för Wi-Fi.....	43
10.4.	Välja alternativ för Bluetooth	44
11.	Anpassa huvudmeny i KeySoft.....	44
12.	Enhandsläge.....	44
13.	Ändra språk	45
14.	Visa och använd Onlinetjänster	45

14.1.	Aktivera Bookshare och ladda ner böcker.....	45
14.2.	Konfigurera, hantera och synkronisera ett NFB Newsline-konto	46
14.3.	NLS Bard.....	46
14.3.1.	Ansluta till BARD för första gången.....	46
14.3.2.	Ladda ner böcker och tidskrifter från BARD	46
14.3.3.	Läsa en nedladdad bok.....	47
15.	Tentamensläge.....	47
16.	Tekniska specifikationer.....	48
16.1.	Navigationskomponenter	48
16.2.	Batterier med lång batteritid.....	48
16.3.	Anslutning.....	48
16.4.	Dimensioner och vikt.....	48
17.	Uppdatera Brailliant BI 40X.....	48
17.1.	Uppdatera Brailliant BI 40X manuellt.....	48
17.2.	Uppdatera Brailliant BI 40X via USB	49
17.3.	Funktionen Automatisk sökning efter uppdateringar	49
18.	Rengöring och rekonditionering	50
19.	Registrerade varumärken	50
20.	Licensavtal för slutanvändare	50
21.	Garanti	51
	Bilaga A - Sammanställning av kommandon.....	52

1. Kom igång

Välkommen till den nya punktdisplayen Brailiant™ BI 40X.

Användarmanualen ger en överblick över enheten och beskriver bland annat användning, navigering och hur enheten uppdateras. För mer information, var god besök [produkt sidan för Brailiant BI 40X](#) på HumanWares webbplats eller ring närmaste återförsäljare av HumanWares produkter.

1.1. Innehåll i förpackningen

Förpackningen innehåller följande artiklar:

- Punktdisplay Brailiant™ X-serie
- USB-C- till USB-A-kabel
- Nätadapter med USB-anslutning
- Bärväska med rem
- Kom igång-manual

1.2. Överblick av Brailiant BI 40X

Brailiant BI 40X har en 40-teckens punktrad, ett punkttangentbord, två mellanslagsknappar, en hemknapp, tre kommandoknappar på varje sida om punktraden (sex totalt) samt fyra tumknappar för navigering.

1.2.1. Ovansidan

Ovansidan på Brailiant kan delas in i två sektioner, främre och bakre.

Den främre sektionen av ovansidan består av en punktrad med 40 punktceller, 40 cursor-routingknappar och 6 kommandoknappar. Varje cursor-routingknapp hör samman med punktcellen precis nedanför. Vid skrivning flyttar en tryckning på någon av dessa cursor-routingknappar skrivmarkören till utpekad position. När menyn visas kommer en tryckning på en cursor-routingknapp att aktivera det utpekade menyvalet.

I övriga lägen aktiverar respektive cursor-routingknapp det objekt som du trycker på.

Kommando-knapparna sitter på varje sida om punktdisplayen, tre till vänster och tre till höger. På vänster sida, med början bakifrån, är dessa C1, C2 och C3, som sitter närmast dig. På höger sida hittar du C4, C5 och C6 närmast dig.

Den bakre sektionen av ovansidan har ett punkttangentbord där varje knapp motsvarar en punkt i en punktcell. Knapparna under den vänstra handen representerar punkt 1, 2, 3, och Backsteg. Punkt 1 är under pekfingeret och Backsteg under lillfingeret. Knapparna under den högra handen representerar punkt 4, 5, 6, och Enter. Punkt 4 är under pekfingeret och Enter under lillfingeret. Det sitter stereo-högtalare till höger och vänster om knapparna samt en integrerad mikrofon bredvid den högra högtalaren (notera att mikrofonen ej är aktiv).

Punkt tangentbordet och kommandoknapparna kan användas för att skriva punktskrift eller utföra kommandon. Kommandona beror på vilken skärmläsare som används.

1.2.2. Framkanten

På framkanten av Brailliant finns fem knappar. Från vänster till höger är dessa knappar:

- Tumknapp Föregående
- Vänster tumknapp
- Hemknapp (cirkulär) - används för att återvända till huvudmenyn eller avsluta punktdisplayläget
- Höger tumknapp
- Tumknapp Nästa

1.2.3. Vänstra kanten

På vänstra kanten av enheten finns följande (framifrån till bakkant):

- USB-A-port
- Strömknapp - tryck ner och håll inne i 2 sekunder för att starta enheten.
- Grön ljusdiod - indikerar visuellt enhetens status
- USB-C-port - använd medföljande kabel för att ansluta punktdisplayen via nätadaptern till ett eluttag eller till en PC.

1.2.4. Högra kanten

På högra kanten av enheten finns följande (framifrån till bakkant):

- Två volymknappar
- 3,5 mm ljudutgång

1.2.5. Undersidan

På undersidan av Brailliant finns två stora gummiytor på varje sida för att förhindra att enheten glider.

I mitten, närmare framkanten finns en svagt nedfälld rektangel med en annan ytstruktur. Denna rektangel är ett klistermärke med tryckt information om hårdvaran i enheten. Ovanför klistermärket finns en punktetikett med enhetens serienummer.

1.3. Ladda Brailliant BI 40X

Innan du börjar använda Brailliant bör du se till att batteriet är fulladdat.

Anslut laddkabeln (änden med USB-C-kontakt) till USB-C-porten på vänstra kanten på Brailliant. Endast minimalt med kraft krävs för att ansluta kabeln då överdriven kraft kan skada kabeln eller enheten.

Anslut den andra änden med USB-A-kontakt till nätadaptern och anslut den till ett eluttag. Anslut änden med USB-A-kontakt på laddkabeln till nätadaptern och anslut den till ett eluttag. Använd den medföljande nätadaptern för optimal laddning.

Alternativt kan enheten laddas genom att ansluta laddkabeln till en dator. Notera dock att denna laddningsmetod är långsammare än laddning med nätadaptern.

1.4. Slå på och av

Strömknappen är oval och finns på vänsterkanten av Brailiant.

Om enheten är laddad, tryck ner och håll inne Strömknappen i ungefär 2 sekunder för att starta Brailiant. Enheten ger ifrån sig en kort vibration och meddelandet "starting" visas på punktraden tillsammans med punkter som cirkulerar under uppstarten.

En kort stund efter att enheten har startats för första gången visas en meny där språk väljs. Tryck Enter för att öppna listan med språk, välj ett passande språk och tryck sedan Enter för att stänga listan.

Ytterligare ett tillgängligt alternativ är "Starta i punktdisplayläge". Om du föredrar att Brailiant startar upp i punktdisplayläge varje gång, efter en fullständig avstängning, kan du aktivera detta genom att trycka Enter. Se under avsnittet Användaralternativ för mer information om aktivering eller inaktivering av uppstart i punktdisplayläge.

Stäng dialogrutan så snart ändringarna är genomförda.

Efter några sekunder är uppstarten klar och meddelandet "punktdisplayläge" visas på punktraden. Brailiant är nu redo att användas.

Om du istället valde att starta i punktdisplayläge visar Brailiant "USB-anslutning".

Tryck ner och håll inne Strömknappen i ungefär 2 sekunder för att stänga av enheten. Ett meddelande för att bekräfta detta visas på punktraden. Välj Ok genom att trycka på tumknappen Föregående eller Nästa och sedan Enter eller en cursor-routingknapp.

Alternativt kan dessa steg följas för att stänga av Brailiant:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Tryck S för att komma till menyalternativ Stäng av.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Välj Ok genom att trycka på tumknappen Föregående eller Nästa.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

1.5. Justera strömsparläge

För att spara batteri går Brailiant ned i strömsparläge efter 5 minuter av inaktivitet. Justera tidslängden för detta under Inställningar/Användaralternativ/Insomningstid. Enheten kan också försättas i strömsparläge med en kort tryckning på Strömknappen.

Väck enheten genom att trycka på Strömknappen.

1.6. Menyn Om

Menyn Om visar information om enheten såsom licenser, upphovsrätt, versions-, modell- och serienummer.

För att öppna menyn Om:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar.
3. Tryck Enter.
4. Gå till alternativet Om.
5. Tryck Enter.

Alternativt går det att använda kortkommandot Mellanslag + I för att öppna dialogrutan.

1.7. Aktivera huvudmenyn

Via huvudmenyn i gränssnittet KeySoft kommer du åt alla funktioner i Brailiant. När enheten startas eller när en applikation stängs av återvänder du automatiskt till denna meny.

När som helst kan du gå till huvudmenyn genom att trycka på Hemknappen på enheten (formad som en cirkel i mitten på framkanten av Brailiant). Alternativt går det att trycka kommandot för Huvudmenyn på tangentbordet med Mellanslag + punkter 1 2 3 4 5 6.

2. Navigering samt användning av menyer

KeySoft Lite är hjärtat i Brailiant BI 40 X och innefattar alla appar i punktdisplayen. KeySofts huvudmeny kan skräddarsys så att du kan dölja och visa önskade applikationer i Huvudmenyn. Mer information om hur du anpassar din Huvudmeny finns i avsnittet [Anpassa Huvudmenyn i KeySoft](#).

2.1. Navigera i Huvudmenyn

Huvudmenyn innehåller följande:

- Punktdisplayläge
- Ordbehandlare
- Victor Reader

- Punktordbehandlare
- Filhanterare
- Kalkylator
- Datum och tid
- Inställningar
- Onlinetjänster
- Användarmanual
- Stäng av

Tryck på tumknapparna Föregående eller Nästa för att flytta i listan till det menyval som önskas. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att aktivera.

Du kan återgå till Huvudmenyn när som helst genom att trycka på Hemknappen eller Mellanslag tillsammans med alla sex punkter.

2.2. Förflytta läsraden till höger/vänster

Många gånger är texten på raden för lång för att få plats på punktläsraden. För att läsa hela meningen förflyttas punktläsraden framåt eller bakåt genom att trycka på tumknapparna Vänster och Höger på Brailiant. Vänster och Höger tumknapp är andra och fjärde knappen på enhetens framkant.

2.3. Använda snabbmenyn för ytterligare funktioner

Snabbmenyn visar alla tillgängliga funktioner och kommandon för den KeySoft-applikation som för tillfället körs. Det är väldigt användbart om du har glömt bort ett specifikt kommando.

Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn. En meny öppnas och visar en lista med funktioner du kan utföra i det aktuella läget. Bläddra genom menyn till önskad funktion och tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att aktivera.

Stäng Snabbmenyn genom att trycka Mellanslag + E.

2.4. Navigering via första bokstaven i ord

För det mesta går det att hoppa direkt till ett menyval genom att ange första bokstaven i menyalternativet. När man gör detta flyttas automatiskt fokus till första menyalternativet som börjar på den bokstaven. Trycker du samma bokstav två gånger kommer du till nästa menyval som börjar på den och så vidare.

För att exempelvis gå till menyvalet Inställningar i Brailiants huvudmeny, öppnar du huvudmenyn och anger bokstaven 'i' med tangentbordet.

Notera att apparna i KeySofts huvudmeny är optimerade för navigering via första bokstaven.

Det är också möjligt att enkelt växla mellan applikationer utan att återvända till huvudmenyn. Bara du känner till första bokstaven för applikationen du vill öppna trycker du denna bokstav tillsammans med Enter och Backsteg.

Till exempel för att öppna Filhanteraren trycker du bokstaven 'F' tillsammans med Enter + Backsteg.

2.5. Använda snabbkommandon/Knappkombinationer för att navigera

Som namnet antyder gör snabbkommandon det enklare att navigera i en meny eller fil.

De vanligaste snabbkommandona som används i Brailiant BI 40X finns i tabell 1.

Tabell 1: Tabell över Snabbkommandon/Knappkombinationer

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Aktivera valt objekt	Enter eller cursor-routingknapp
Escape eller Tillbaka	Mellanslag + E
Föregående objekt	tumknapp Föregående, C1 eller Mellanslag + punkt 1
Nästa objekt	tumknapp Nästa, C3 eller Mellanslag + punkt 4
Hoppa till något objekt i en lista	Skriv in första bokstaven för det önskade objektet eller appen
Rulla vänster och höger	Vänster och Höger tumknapp eller C2 (rulla vänster) och C5 (rulla höger)
Gå överst	Mellanslag + punkter 1-2-3
Gå nederst	Mellanslag + punkter 4-5-6
Växla punktskriftnivå	Backsteg + G
Växla språkprofil	Enter + L eller C4
Batterinivå	Enter + P
Snabbmeny	Mellanslag + M
Huvudmeny	Mellanslag + Punkter 1-2-3-4-5-6 eller Hemknappen
Systeminformation	Mellanslag + I
Tid	Enter + T
Datum	Enter + D
Mata ut media	Enter + E
Inställningar	Mellanslag + O
Snabbanteckning	Backsteg + N
Snabb punktanteckning	Backsteg + B

Notera: Till alla kommandon som innehåller Enter eller Backsteg måste Mellanslag läggas till när du använder datapunktskrift.

3. Använda Ordbehandlaren

Ordbehandlaren är en applikation som används till att öppna, redigera och skapa textfiler på Brailiant. Du kan öppna följande filer med Ordbehandlaren: .docx, .doc, .txt, .brf, .brl, .pdf, .ban och .bra. Filerna som skapas eller redigeras sparas som .txt-filer.

Öppna Ordbehandlaren genom att trycka på tumknappen Nästa tills alternativet Ordbehandlare visas eller tryck 'o' i Huvudmenyn och sedan Enter eller en cursor-routingknapp.

Ordbehandlaren öppnar en undermeny som innehåller alternativen Skapa fil, Öppna fil, Senast sparade, Inställningar och Stäng.

3.1. Skapa en fil

Det finns flera sätt att skapa en fil beroende på din aktuella plats i enheten.

- Om du befinner dig i menyn i Ordbehandlaren väljer du Skapa fil och trycker Enter eller en cursor-routingknapp.
- Öppna snabbmenyn i Ordbehandlaren och välj skapa fil i Arkivmenyn.
- Alternativt, tryck Backsteg + N var som helst i enheten för att snabbt skapa en ny fil.

Markören visas mellan två hakparenteser i punkt och kan ställas in som blinkande under inställningar. Du kan nu börja skriva i din nya fil.

3.2. Öppna en fil

Om du befinner dig i menyn i Ordbehandlaren väljer du Öppna fil och trycker Enter eller en cursor-routingknapp. Alternativt kan du trycka Backsteg + O, välj sedan filen som ska öppnas med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.

Notera att Brailiant kan visa felmeddelanden när en PDF-fil öppnas. Detta sker vanligtvis när filen innehåller bilder istället för text.

3.3. Senast sparade

Du kan visa en lista över de tio senaste dokumenten du har sparat för snabb åtkomst.

För att öppna en lista med de tio senaste filerna väljer du Ordbehandlare i huvudmenyn. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når senast sparade och trycker Enter.

Du kan bläddra bland de tio senaste filerna med tumknapparna Föregående och Nästa. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att öppna en fil från listan.

3.4. Stänga en fil

För att stänga en öppen fil i Ordbehandlaren trycker du Mellanslag + E. Alternativt kan du öppna Snabbmenyn med Mellanslag + M och sedan bläddra till Arkivmenyn och aktivera den. Välj alternativet Stäng fil.

Om det finns ändringar i filen som inte har sparats kommer du att bli tillfrågad om du vill spara dessa innan filen stängs.

3.5. Spara en textfil

Det finns två typer av spara i Ordbehandlaren: Spara och Spara som.

Spara: Tryck Mellanslag + S för att spara din fil till ett redan existerande filnamn.

Spara som: Tryck Backsteg + S för att spara en kopia av filen med ett nytt filnamn samt ändra sökväg.

Om filen aldrig har sparats ombeds du att ange ett filnamn oavsett vilken metod av spara som används.

Notera att om du öppnar en fil med en annan filändelse än .txt kommer enheten att fråga ifall du önskar behålla originalfilen utöver .txt-filen som kommer att sparas.

3.6. Automatisk rullning i skriven text i Ordbehandlaren

Appen Ordbehandlare har en rullningsfunktion som automatiskt rullar fram den skrivna texten på punktdisplayen.

Tryck Enter + Punkter 1-2-4-5-6 eller C6 för att starta Automatisk rullning.

tryck valfri knapp för att stoppa Automatisk rullning.

3.6.1. Ändra hastighet för Automatisk rullning

Du kan ändra Rullningshastighet när Automatisk rullning är aktiverat i en fil.

Tryck Enter + Punkt 3 för att minska Rullningshastigheten.

Tryck Enter + Punkt 6 för att öka Rullningshastigheten.

3.7. Söka text i en fil

För att söka text i en fil trycker du Mellanslag + F. Ange sökordet i det tomma fältet. Markören placeras vid första platsen där texten återfinns.

Tryck Mellanslag + N för att söka ytterligare förekomster av sökordet.

Tryck Mellanslag + P för att söka tidigare förekomster av sökordet.

3.7.1. Söka och ersätta text

För att söka och ersätta text:

1. Tryck Backsteg + F.
2. Ange sökord att hitta i den första redigeringsrutan.
3. Ange text att ersätta med i den andra redigeringsrutan.
4. Tryck på knappen Nästa för att söka nästa förekomst av ordet.
5. Tryck på knappen Ersätt alla för att söka och ersätta alla.

3.8. Klippa ut, kopiera och klistra in text

Ordbehandlaren låter dig klippa ut, kopiera och klistra in text på liknande sätt som i andra datorprogram.

För att markera texten positionerar du markören på första tecknet med hjälp av en cursor-routingknapp och trycker sedan Enter + S.

Alternativt kan du markera texten via Snabbmenyn:

1. Öppna Snabbmenyn med Mellanslag + M.
2. Flytta ner till alternativet Redigera.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Flytta ner till alternativet Markera text.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

Detta markerar början av markeringen. Gå sedan till punkten för slutet av din markering och tryck Mellanslag + S för att slutföra markeringen.

För att markera all text i filen trycker du Enter + 1-2-3-4-5-6.

För att kopiera den markerade texten trycker du Backsteg + Y.

För att klippa ut den markerade texten trycker du Backsteg + X.

För att klistra in den kopierade eller urklippta texten positionerar du markören där texten ska klistras in med hjälp av en cursor-routingknapp samt trycker Backsteg + V.

Som alltid kan dessa kommandon även nås via Snabbmenyn.

Kortkommandot Backsteg + Y kan också användas för att kopiera det senaste resultatet från appen Kalkylatorn samt det aktuella stycket från appen Victor Reader.

3.9. Använda läsläge

I Läsläget kan du läsa filer utan att riskera redigering av misstag. Det går inte att redigera filer när Läsläget är aktivt.

Tryck Mellanslag + X för att aktivera eller inaktivera Läsläget.

Aktivera eller inaktivera Läsläget via Snabbmenyn:

1. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.

2. Välj Arkiv med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Välj Läsläge med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

3.10. Infoga datum och tid

När du skapar en fil i Ordbehandlaren har du möjlighet att infoga aktuellt datum och tid i filen.

Infoga datum och tid:

1. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.
2. Välj Redigera med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Välj Infoga med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
6. Välj Infoga datum eller Infoga tid med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
7. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

3.11. Infoga, navigera till samt ta bort bokmärken

Bokmärken är mycket användbara när du vill spara en position i en fil för att snabbt kunna återvända till den vid ett senare tillfälle.

Öppna Bokmärkesmenyn genom att trycka Enter + M. Alternativt kan du öppna Snabbmenyn med Mellanslag + M och sedan välja Bokmärken.

3.11.1. Infoga ett bokmärke

Infoga ett bokmärke i en fil:

1. Tryck Enter + M för att öppna Bokmärkesmenyn.
2. Välj Infoga bokmärke med tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Ange ett specifikt unikt nummer för bokmärket.
Notera: om du inte anger ett nummer kommer Brailiant att välja det första tillgängliga numret och tilldela bokmärket detta.
5. Tryck Enter.

Alternativt kan du infoga ett bokmärke genom att trycka Enter + B. Notera att maximalt 98 bokmärken kan infogas i ett dokument i Ordbehandlaren.

3.11.2. Navigera till bokmärke

För att flytta till ett bokmärke trycker du Enter + J. Enheten frågar efter bokmärkets nummer. Ange numret för bokmärket du önskar navigera till och tryck Enter.

3.11.3. Ta bort bokmärke

Ta bort ett sparad bokmärke:

1. Tryck Enter + M för att öppna Bokmärkesmenyn.
2. Välj ta bort bokmärke med tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Ange numret för bokmärket du önskar ta bort.
5. Tryck Enter.

Notera: om du önskar ta bort alla bokmärken i dokumentet anger du 99 när enheten frågar efter bokmärkesnummer.

3.12. Aktivera dokumentsymboler

När dokumentsymboler aktiveras visas hakparenteser på punktraden som markerar början och slutet på texten.

För att aktivera dokumentsymboler:

1. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.
2. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når Arkivmenyn och tryck Enter.
3. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når Inställningar och tryck Enter.
4. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når Dokumentsymboler och tryck Enter.
5. Tryck Enter för att inaktivera Dokumentsymboler, tryck Enter igen för att aktivera dem.

Notera att inaktivering av Dokumentsymboler endast gäller Ordbehandlaren, alla andra redigeringsfält kommer fortsätta att visa dokumentsymboler.

3.13. Tabell med kommandon för Ordbehandlaren

Kommandon för Ordbehandlaren finns i Tabell 2.

Tabell 2: Kommandon för Ordbehandlaren

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Aktivera redigeringsläge	Enter eller en cursor-routingknapp
Lämna redigeringsläge	Mellanslag + E
Skapa en fil	Backsteg + N
Öppna fil	Backsteg + O
Spara	Mellanslag + S
Spara som	Backsteg + S
Sök	Mellanslag + F
Sök nästa	Mellanslag + N
Sök föregående	Mellanslag + P

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Ersätt	Backsteg + F
Start/slut på markering	Enter + S
Markera allt	Enter + A
Kopiera	Backsteg + Y
Klipp ut	Backsteg + X
Klistra in	Backsteg + V
Radera föregående ord	Backsteg + punkt 2
Radera aktuellt ord	Mellanslag + punkter 2-5
Radera föregående tecken	Backsteg
Flytta till nästa redigeringsruta vid redigering	Enter
Flytta till nästa redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Nästa
Flytta till föregående redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Föregående
Flytta infogningspunkt till början av textfält	Mellanslag + punkter 1-2-3
Flytta infogningspunkt till slutet av textfält	Mellanslag + punkter 4-5-6
Starta automatisk rullning	Mellanslag + punkter 1-2-4-5-6 eller C6
Öka rullningshastighet	Enter + punkt 6
Minska rullningshastighet	Enter + punkt 3
Växla läsläge	Mellanslag + X
Bokmärkesmeny	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Infoga bokmärke	Enter + B

4. Använda Punktordbehandlaren

Punktordbehandlaren är en applikation som används till att öppna, redigera och skapa punktdokument i formaten .brf och .brl. Filerna som skapas eller redigeras sparas som .brf-filer.

Öppna Punktordbehandlaren genom att trycka på tumknappen Nästa tills alternativet Punktordbehandlare visas eller tryck 'P' i Huvudmenyn och sedan Enter eller en cursor-routingknapp.

Punktordbehandlaren öppnar en undermeny som innehåller alternativen Skapa fil, Öppna fil, Senast sparade, Inställningar och Stäng.

4.1. Skapa en fil

Det finns flera sätt att skapa en fil beroende på din aktuella plats i enheten.

- Om du befinner dig i menyn i Punktordbehandlaren väljer du Skapa fil och trycker Enter eller en cursor-routingknapp.
- Öppna snabbmenyn i Punktordbehandlaren och välj skapa fil i Arkivmenyn.
- Alternativt, tryck Backsteg + B var som helst i enheten för att snabbt skapa en ny .brf-fil.

Markören visas mellan två hakparenteser i punkt och kan ställas in som blinkande under inställningar. Du kan nu börja skriva i din nya fil.

4.2. Öppna en fil

Om du befinner dig i menyn i Punktordbehandlaren väljer du Öppna fil och trycker Enter eller en cursor-routingknapp. Alternativt kan du trycka Backsteg + O, välj sedan filen som ska öppnas med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.

4.3. Senast sparade

Du kan skapa en lista över de tio senaste dokumenten du har sparat för snabb åtkomst.

För att öppna en lista med de tio senaste filerna väljer du Punktordbehandlaren i huvudmenyn. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når senast sparade och tryck Enter.

Du kan bläddra bland de tio senaste filerna med tumknapparna Föregående och Nästa. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att öppna en fil från listan.

4.4. Stänga en fil

För att stänga en öppen fil i Punktordbehandlaren trycker du Mellanslag + E. Alternativt kan du öppna Snabbmenyn med Mellanslag + M och sedan bläddra till Arkivmenyn och aktivera den. Välj alternativet Stäng fil.

Om det finns ändringar i filen som inte har sparats kommer du att bli tillfrågad om du vill spara dessa innan filen stängs.

4.5. Spara en punktfil

Det finns två typer av spara i Punktordbehandlaren: Spara och Spara som.

Spara: Tryck Mellanslag + S för att spara din fil till ett redan existerande filnamn.

Spara som: Tryck Backsteg + S för att spara en kopia av filen med ett nytt filnamn samt ändra sökväg.

Om filen aldrig har sparats ombeds du att ange ett filnamn oavsett vilken metod av spara som används.

4.6. Exportera en punktfil till text

En .brf-fil som är öppen i Punktordbehandlaren kan exporteras som en textfil. Detta är användbart om du vill öppna dem i Ordbehandlaren och fortsätta arbeta med dem i ett annat format.

Exportera en punktfil till text:

1. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.
2. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når alternativet Redigera tryck Enter.
3. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når alternativet Exportera som text och tryck Enter.
4. Brailiant visar en lista med punkttabeller för exporten. Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att välja önskad punkttabell och tryck Enter.
5. Du uppmanas att skriva in ett namn för den exporterade filen. Skriv in önskat namn och tryck Enter.
6. En lista med mappar i Filhanteraren visas där du kan spara din skapade fil. Välj önskad mapp med tumknapparna Föregående och Nästa samt tryck Enter.

4.7. Använda automatisk rullning i Punktordbehandlaren

Punktordbehandlaren har en rullningsfunktion som automatiskt rullar fram den skrivna texten på punktdisplayen.

Tryck Enter + Punkter 1-2-4-5-6 för att starta Automatisk rullning.

tryck valfri knapp för att stoppa Automatisk rullning.

4.7.1. Ändra hastighet för Automatisk rullning

Du kan ändra Rullningshastighet när Automatisk rullning är aktiverat i en fil.

Tryck Enter + Punkt 3 för att minska Rullningshastigheten.

Tryck Enter + Punkt 6 för att öka Rullningshastigheten.

4.8. Söka text i en fil

För att söka text i en fil trycker du Mellanslag + F. Ange sökordet i det tomma fältet. Markören placeras vid första platsen där texten återfinns.

Tryck Mellanslag + N för att söka ytterligare förekomster av sökordet.

Tryck Mellanslag + P för att söka tidigare förekomster av sökordet.

4.8.1. Söka och ersätta text

För att söka och ersätta text:

1. Tryck Backsteg + F.
2. Ange sökord att hitta i den första redigeringsrutan, kallad Sök.
3. Ange text att ersätta med i den andra redigeringsrutan, kallad Ersätt.
4. Välj Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av den sökta texten med texten från redigeringsrutan Ersätt.
5. Tryck på knappen Nästa för att söka och ersätta nästa förekomst av ordet.
6. Tryck på knappen Föregående för att söka och ersätta tidigare förekomster av ordet.

4.9. Klippa ut, kopiera och klistra in text

Punktordbehandlaren låter dig klippa ut, kopiera och klistra in text på liknande sätt som i andra datorprogram.

För att markera texten positionerar du markören på första tecknet med hjälp av en cursor-routingknapp och trycker sedan Enter + S.

Alternativt kan du markera texten via Snabbmenyn:

1. Öppna Snabbmenyn med Mellanslag + M.
2. Flytta ner till alternativet Redigera.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Flytta ner till alternativet Markera text.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

Detta markerar början av markeringen. Gå sedan till punkten för slutet av din markering och tryck Mellanslag + S för att slutföra markeringen.

För att markera all text i filen trycker du Enter + 1-2-3-4-5-6.

För att kopiera den markerade texten trycker du Backsteg + Y.

För att klippa ut den markerade texten trycker du Backsteg + X.

För att klistra in den kopierade eller urklippta texten positionerar du markören där texten ska klistras in med hjälp av en cursor-routingknapp samt trycker Backsteg + V.

Som alltid kan dessa kommandon även nås via Snabbmenyn.

Kortkommandot Backsteg + Y kan också användas för att kopiera det senaste resultatet från appen Kalkylatorn samt det aktuella stycket från appen Victor Reader.

4.10. Använda läsläge

I Läsläget kan du läsa filer utan att riskera redigering av misstag. Det går inte att redigera filer när Läsläget är aktivt.

Tryck Mellanslag + X för att aktivera eller inaktivera Läsläget.

Aktivera eller inaktivera Läsläget via Snabbmenyn:

1. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.
2. Välj Arkiv med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Välj Läsläge med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

4.11. Infoga, navigera till samt ta bort bokmärken

Bokmärken är mycket användbara när du vill spara en position i en fil för att snabbt kunna återvända till den vid ett senare tillfälle.

Öppna Bokmärkesmenyn genom att trycka Enter + M. Alternativt kan du öppna Snabbmenyn med Mellanslag + M och sedan välja Bokmärkesmenyn.

4.11.1. Infoga ett bokmärke

Infoga ett bokmärke i en fil:

1. Tryck Enter + M för att öppna Bokmärkesmenyn.
2. Välj Infoga bokmärke med tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Ange ett specifikt unikt nummer för bokmärket.
Notera: om du inte anger ett nummer kommer Brailiant att välja det första tillgängliga numret och tilldela bokmärket detta.
5. Tryck Enter.

Alternativt kan du infoga ett bokmärke genom att trycka Enter + B. Notera att maximalt 98 bokmärken kan infogas i ett dokument i Ordbehandlaren.

4.11.2. Navigera till bokmärke

För att flytta till ett bokmärke trycker du Enter + J. Enheten frågar efter bokmärkets nummer. Ange numret för bokmärket du önskar navigera till och tryck Enter.

4.11.3. Ta bort bokmärke

Ta bort ett sparad bokmärke:

1. Tryck Enter + M för att öppna Bokmärkesmenyn.
2. Välj ta bort bokmärke med tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Ange numret för bokmärket du önskar ta bort.
5. Tryck Enter.

Notera: om du önskar ta bort alla bokmärken i dokumentet anger du 99 när enheten frågar efter bokmärkesnummer.

4.12. Aktivera dokumentsymboler

När dokumentsymboler aktiveras visas hakparenteser på punktraden som markerar början och slutet på texten.

För att aktivera dokumentsymboler:

1. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.
2. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når Arkivmenyn och tryck Enter
3. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når inställningar för Ordbehandlare och tryck Enter
4. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når visa dokumentsymboler och tryck Enter
5. Tryck Enter för att inaktivera Dokumentsymboler, tryck Enter igen för att aktivera dem.

Notera att inaktivering av Dokumentsymboler endast gäller Punktordbehandlaren, alla andra redigeringsfält kommer fortsätta att visa dokumentsymboler.

4.13. Tabell med kommandon för Punktordbehandlaren

Kommandon för Ordbehandlaren finns i Tabell 3.

Tabell 3: Kommandon för Punktordbehandlaren

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Aktivera redigeringsläge	Enter eller en cursor-routingknapp
Lämna redigeringsläge	Mellanslag + E
Skapa en punktfil	Backsteg + B
Öppna punktfil	Backsteg + O
Spara	Mellanslag + S
Spara som	Backsteg + S
Sök	Mellanslag + F
Sök nästa	Mellanslag + N
Sök föregående	Mellanslag + P
Ersätt	Backsteg + F

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Start/slut på markering	Enter + S
Markera allt	Enter + Punkter 1-2-3-4-5-6
Kopiera	Backsteg + Y
Klipp ut	Backsteg + X
Klistra in	Backsteg + V
Radera föregående ord	Backsteg + punkt 2
Radera aktuellt ord	Mellanslag + punkter 2-5
Radera föregående tecken	Backsteg
Flytta till nästa redigeringsruta vid redigering	Enter
Flytta till nästa redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Nästa
Flytta till föregående redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Föregående
Flytta infogningspunkt till början av textfält	Mellanslag + punkter 1-2-3
Flytta infogningspunkt till slutet av textfält	Mellanslag + punkter 4-5-6
Starta automatisk rullning	Mellanslag + punkter 1-2-4-5-6
Öka rullningshastighet	Enter + punkt 6
Minska rullningshastighet	Enter + punkt 3
Växla läsläge	Mellanslag + X
Bokmärkesmeny	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Infoga bokmärke	Enter + B

5. Använda Victor Reader

Victor Reader är applikationen som används för att läsa eller lyssna på böcker med Brailiant. Den har stöd för följande filformat: .brf, .pef, .txt, .html, .docx, DAISY 2, DAISY 2.02, Niso, .rtf, .ban, .bra, .pdf, .FB2.

För att öppna appen Victor Reader trycker du tumknappen Nästa tills du når Victor Reader eller 'V' i Huvudmenyn. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att starta appen.

Menyn i Victor Reader innehåller Boklista, Senast lästa, Sök samt Stäng.

5.1. Navigera i boklistan

I Victor Reader lagras dina böcker i Boklistan vilket är jämförbart med en mapp som innehåller all tillgänglig media på din enhet i alfabetisk ordning.

Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att välja en bok från Boklistan och tryck sedan Enter eller en cursor-routingknapp.

Notera att Brailiant kan visa ett felmeddelande när en PDF-bok öppnas. Detta sker vanligtvis när filen innehåller bilder istället för text.

Tryck Mellanslag + E eller Mellanslag + B för att stänga en bok och återvända till Boklistan.

5.1.1. Söka efter böcker

Söka efter en specifik bok på enheten:

1. Välj Sök i menyn i Victor Reader eller tryck Mellanslag + F.
2. Skriv in text/namnet på boken.
3. Tryck Enter.
En lista med böcker som matchar sökningen visas.
4. Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att stega fram till boken.
5. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att öppna den.

5.1.2. Visa senast öppnade böcker

Du kan visa en lista med de fem senast öppnade böckerna för snabb åtkomst.

Tryck Enter + F eller välj alternativet Senast lästa i menyn i Victor Reader för att visa listan med de fem senaste böckerna.

Du kan stega bland de fem senaste böckerna med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att öppna en bok i listan.

5.1.3. Hantera dina böcker

När du utforskar Boklistan kan du kopiera, flytta eller ta bort en markerad bok från applikationen Victor Reader till en extern lagringsenhet. Olika funktioner är tillgängliga för varje bok beroende på var den är placerad. I Snabbmenyn visas vilka funktioner som är tillgängliga.

Grundreglerna är:

- Böcker på USB-lagringsenhet kan tas bort.
- Böcker nedladdade från onlinetjänster kan flyttas eller tas bort.
- Böcker kan endast kopieras eller flyttas till/från när en extern lagringsenhet är ansluten.
- Det går inte att kopiera eller flytta böcker inom det interna lagringsminnet.

Kopiera, flytta eller ta bort en bok:

1. Visa boklistan med Mellanslag + B.
2. Välj en bok genom att trycka på tumknappen Föregående eller Nästa.

3. Tryck Backsteg + M för att öppna menyn Bokhantering.
4. Välj Kopiera till, Flytta till eller Ta bort.

5.2. Navigering och ytterligare information om böcker

Det enklaste sättet att navigera i en bok är genom att använda tumknapparna. Använd tumknapparna Vänster och Höger för att flytta åt vänster eller höger i texten.

5.2.1. Ändra navigationsnivå i böcker

Det finns olika navigationsnivåer vilket gör navigering i en bok enklare. Dessa navigationsnivåer är definierade av bokens producent så de kan variera från bok till bok.

Ändra navigationsnivå:

1. Tryck Mellanslag + T.
2. Stega bland de tillgängliga Navigationsnivåerna med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att välja Navigationsnivå.

Så snart Navigationsnivån är vald används tumknapparna Föregående och Nästa för att navigera på den valda nivån.

Om du exempelvis väljer Navigationsnivån "Mening" flyttar en tryckning på tumknappen Nästa fram dig mening för mening i boken.

Alternativt kan du välja navigationsnivå genom att använda ett kortkommando:

1. Tryck Backsteg + Punkt 6 för att byta till nästa navigationsnivå eller tryck Backsteg + Punkt 3 för att byta till föregående navigationsnivå.
2. Tryck tumknapparna Föregående eller Nästa för att navigera i boken på vald navigationsnivå.

5.2.2. Navigera efter sida, rubrik, procent eller bokmärken

För att nå en specifik sida, rubrik, procent i boken eller bokmärke:

1. Tryck Enter + G.
2. Stega bland de tillgängliga navigationsalternativen med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Välj mellan sida, rubrik, procent eller bokmärke.
Notera att alternativen kan variera beroende på hur boken är formaterad.
4. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
5. Ange ett värde. T.ex. 4 för att gå till den fjärde rubriken i boken.
6. Tryck Enter.

5.2.3. Automatisk rullning i textböcker i appen Victor Reader

Funktionen Automatisk rullning i Brailiant BI 40X låter dig rulla genom texten i en öppen bok automatiskt.

Tryck Mellanslag + Punkter 1-2-4-5-6 eller C6 i en bok. Tryck på valfri knapp för att avsluta Automatisk rullning och återvända till vanligt läge.

Du kan ändra Rullningshastighet vid användning av Automatisk rullning i en bok.

Tryck Enter + Punkt 3 för att minska Rullningshastigheten.

Tryck Enter + Punkt 6 för att öka Rullningshastigheten.

5.2.4. Hitta aktuell position i en bok

Använd kommandot Var är jag när du behöver ta reda på den aktuella positionen i en bok.

Tryck Mellanslag + Punkter 1-5-6 för att aktivera kommandot Var är jag.

Alternativt aktiveras Snabbmenyn med Mellanslag + M. Stega fram till alternativet Var är jag med tumknapparna Föregående och Nästa och tryck sedan Enter eller en cursor-routingknapp för att aktivera alternativet.

Tryck på tumknapparna Föregående eller Nästa för att flytta i listan med tillgänglig information (Rubrik, Procent, Sida och Rad). Använd tumknapparna Vänster och Höger för att flytta åt vänster eller höger i texten.

5.2.5. Navigera till början eller slutet av en bok

Navigera till början eller slutet av en bok med hjälp av kortkommando.

Tryck Mellanslag + Punkter 1-2-3 för att gå till början av en bok.

Tryck Mellanslag + Punkter 4-5-6 för att gå till slutet av en bok.

5.2.6. Söka text i en textbok

Ett annat sätt att navigera i en bok är att söka efter en specifik textsträng.

Tryck Mellanslag + F för att söka efter text. Du uppmanas att skriva in texten. Skriv in texten och tryck sedan Enter.

5.2.7. Visa ytterligare bokinformation

Du kan visa ytterligare information om den aktuella boken som läsas med enheten (titel, författare, beskrivning, datum, språk, ämne, utgivare och bokmärken).

Tryck Mellanslag + I för att visa ytterligare bokinformation.

Du kan också aktivera Snabbmenyn med Mellanslag + M. Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att välja alternativet Information och tryck sedan Enter eller en cursor-routingknapp.

Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att stega genom den tillgängliga bokinformationen. Använd tumknapparna Vänster och Höger för att flytta åt vänster eller höger i texten.

5.3. Lägga till, navigera, markera och ta bort bokmärken

Bokmärken är användbara för att hålla reda på positioner i en bok och låter dig snabbt återvända till dessa positioner vid ett senare tillfälle, oavsett om det är en fysisk position i en textbok eller en tidsposition i en ljudbok.

Tryck Enter + M för att öppna Bokmärkesmenyn. Du kan också trycka Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn och sedan välja menyn Bokmärke.

5.3.1. Lägga in ett bokmärke

Lägga in ett bokmärke i en bok:

1. Tryck Mellanslag + M för att öppna Bokmärkesmenyn.
2. Välj alternativet Infoga bokmärke med hjälp av tumknapparna Föregående eller Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Ange ett specifikt oanvänt bokmärkesnummer.
Notera: Om du inte skriver in ett nummer kommer Brailiant att välja det första tillgängliga numret och tilldela bokmärket.
5. Tryck Enter.

Alternativt kan du infoga ett Snabbbokmärke genom att trycka Enter + B.

5.3.2. Navigera till bokmärken

Tryck Enter + J för att hoppa till ett bokmärke. Du uppmanas att ange bokmärkesnumret. Skriv in bokmärkesnumret du önskar navigera till och tryck sedan Enter.

5.3.3. Markerande bokmärken

Markerande bokmärken används för att märka ut en Start- och Slutposition för ett textavsnitt. Användning av Markerande bokmärken är ett bra sätt att studera viktiga avsnitt i en bok.

Infoga Markerande bokmärken:

1. Öppna Bokmärkesmenyn med Enter + M.
2. Välj alternativet Början på markerande bokmärke med hjälp av tumknapparna Föregående eller Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Ange ett specifikt oanvänt bokmärkesnummer.
Notera: Om du inte skriver in ett nummer kommer Brailiant att välja det första tillgängliga numret och tilldela bokmärket.
5. Tryck Enter.
6. Navigera till slutpunkten för det markerade avsnittet.

7. Öppna Bokmärkesmenyn med Enter + M.
8. Välj Slut på markerande bokmärke med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
9. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
Den aktuella positionen är nu inställd som slutposition. Om slutpositionen placeras före startpunkten kommer de att byta plats.

5.3.4. Visa markerande bokmärke

Visa markerande bokmärke:

1. Tryck Enter + H för att öppna listan med Markerande bokmärken.
2. Välj ett bokmärkesnummer för ett Markerande bokmärke.
3. Tryck Enter.
Innehållet i det aktuella Markerande bokmärket visas.
4. Använd tumknapparna för att navigera.
5. Tryck Mellanslag + E för att stänga Markerande bokmärken och återvända till bokinnehållet.

5.3.5. Ta bort bokmärken

Ta bort ett sparad Bokmärke:

1. Tryck Enter + M för att öppna Bokmärkesmenyn.
2. Stega till alternativet Ta bort bokmärke med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. Skriv in numret för Bokmärket som du vill ta bort.
5. Tryck Enter.

Notera: Om du vill ta bort alla bokmärken anger du 99999 när du ombeds ange bokmärkesnummer.

5.4. Tabeller över kommandon och läskommandon för Victor Reader

Victor Reader kommandon och läskommandon för textböcker finns i Tabell 4.

Tabell 4: Victor Reader/Läskommandon för textböcker

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Boklista	Mellanslag + B
Bokhantering	Backsteg + M
Gå till menyn Inställningar	Enter + G
Menyn Bokmärke	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Lägga in ett Snabbokmärke	Enter + B

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Visa Markerande bokmärke	Enter + H
Öppna Navigationsnivå	Mellanslag + T
Föregående element	Tumknapp Föregående
Nästa element	Tumknapp Nästa
Föregående Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 3
Nästa Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 6
Starta automatisk rullning	Mellanslag + punkter 1-2-4-5-6 eller C6
Öka rullningshastighet	Enter + punkt 6
Minska rullningshastighet	Enter + punkt 3
Var är jag	Mellanslag + punkter 1-5-6
Information	Mellanslag + I
Gå till början av boken	Mellanslag + punkter 1-2-3
Gå till slutet av boken	Mellanslag + punkter 4-5-6
Öppna senaste böcker	Enter + R
Sök efter böcker eller text	Mellanslag + F
Sök nästa	Mellanslag + N
Sök föregående	Mellanslag + P
Nästa icke tom rad	Enter + punkt 4
Föregående icke tom rad	Enter + punkt 1
Föregående tecken	Mellanslag + punkt 3
Nästa tecken	Mellanslag + punkt 6
Föregående ord	Mellanslag + punkt 2
Nästa ord	Mellanslag + punkt 5
Föregående stycke	Mellanslag + punkter 2-3
Nästa stycke	Mellanslag + punkter 5-6
Påbörja/avsluta markering	Enter + S
Markera allt (aktuellt stycke)	Enter + Punkter 1-2-3-4-5-6
Kopiera (aktuellt stycke)	Backsteg + Y
Ta bort bok	Backsteg + Punkter 2-3-5-6

Victor Reader kommandon och läskommandon för ljudböcker finns i Tabell 5.

Tabell 5: Victor Reader/Läskommandon för ljudböcker

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Boklista	Mellanslag + B
Bokhantering	Backsteg + M
Gå till menyn Inställningar	Enter + G
Menyn Bokmärke	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Lägga in ett Snabbbokmärke	Enter + B
Visa Markerande bokmärke	Enter + H
Öppna Navigationsnivå	Mellanslag + T
Föregående element	Tumknapp Föregående
Nästa element	Tumknapp Nästa
Föregående Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 3
Nästa Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 6
Var är jag	Mellanslag + punkter 1-5-6
Information	Mellanslag + I
Gå till början av boken	Mellanslag + punkter 1-2-3
Gå till slutet av boken	Mellanslag + punkter 4-5-6
Öppna senaste böcker	Enter + R
Ta bort bok	Backsteg + Punkter 2-3-5-6
Spela/pausa	Mellanslag + G
Stoppa uppspelning	Backsteg + Enter
Spola framåt 5 sekunder	Höger tumknapp (enkel tryckning)
Spolar bakåt 5 sekunder	Vänster tumknapp (enkel tryckning)
Spola framåt (längre tidshopp)	Höger tumknapp (tryck ner och håll in)
Spolat bakåt (längre tidshopp)	Vänster tumknapp (tryck ner och håll in)
Öka hastighet	Enter + punkt 5
Minska hastighet	Enter + punkt 2

6. Använda Punktdisplayläget

En av huvudfunktionerna i Brailiant är Punktdisplayläget. När punktdisplayen är ansluten till en enhet som kör en skärmläsare, såsom en dator eller en smart enhet, visar Punktdisplayläget texten från den anslutna enheten.

Du kan ansluta till enheter via trådlös *Bluetooth*[®] eller genom att ansluta den medföljande USB-C-kabeln. Upp till fem Bluetooth-enheter och en USB kan vara anslutna samtidigt.

Notera, om en enhet är ansluten till Brailiant via USB kan du få Brailiant att automatiskt starta i Punktdisplayläge.

6.1. Aktivera och avsluta Punktdisplayläget

För att ansluta i Punktdisplayläget måste enheten köra Windows[®], iOS[®], Android eller Mac[®] samt en skärmläsare.

Aktivera Punktdisplayläge:

1. Tryck Mellanslag + punkter 1-2-3-4-5-6 eller Hemknappen för att gå till Huvudmenyn.
2. Välj Punktdisplayläge genom att trycka 'p' eller stega till det genom att använda tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

Avsluta Punktdisplayläget och visa listan med anslutna enheter genom att trycka på Hemknappen en gång.

6.1.1. Avgöra kompatibilitet med Brailiant BI 40X

Brailiant är kompatibel med följande:

Skärmläsare: JAWS[®] 18+ (version 18 och senare), NVDA, SuperNova, ChromeVox (endast USB), Android (endast USB) och VoiceOver

Operativsystem: Windows 8+, Android, macOS[®] 10.15+ (Catalina), eller iOS 13.4+

6.1.2. Väck en iOS-enhet med Brailiant

När din iOS-enhet är låst kan du trycka på någon cursor-routingknapp på Brailiant för att väcka den och ange upplåsningskod. Detta låter dig förvara din iOS-enhet i en ficka eller väska medan du använder Brailiant för att styra och ta emot all utmatning.

6.1.3. Ansluta via USB

Ansluta via USB:

1. Anslut Brailiant till en Windows- eller Mac-dator med USB-C-kabeln.
2. Välj Anslutna enheter (första objektet i menyn för Punktdisplayläget).
3. Tryck Enter.
4. Välj USB-anslutning.

5. Tryck Enter.
6. Vänta tills anslutningen är upprättad.

Om anslutningen lyckas kommer innehållet från den anslutna enheten att visas på punktdisplayen.

Brailliant är nu också tillgänglig som ett externt tangentbord för att skriva på den anslutna enheten.

6.1.4. Ansluta via Bluetooth

Parkoppla en ny enhet med Bluetooth:

1. Aktivera Bluetooth på enheten som ska anslutas.
2. Gå till huvudmenyn i Braillianten.
3. Välj Punktdisplayläge och tryck Enter eller en cursor-routingknapp.
4. I menyn i Punktdisplayläge, välj Lägg till Bluetoothenhet och tryck Enter.
Om Bluetooth är Av kommer det automatiskt att aktiveras. Notera att så snart Bluetooth är aktiverat kommer enheten att vara synlig i 5-minuter för andra Bluetoothenheter.
Notera att du när som helst kan trycka ner och hålla inne Enter i 5 sekunder för att försätta enheten i synligt läge i 5 minuter.
5. Punktdisplayen visar instruktioner om hur man ansluter till enheten. Påbörja parkopplingen från enheten till Brailliant BI 40X.
6. På punktdisplayen visas ett meddelande: "xx är ansluten", där xx är namnet på den enhet som har parkopplats.
Fokus återgår till listan med anslutna enheter.
7. Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att stega i listan med anslutna enheter tills du når enheten som du försöker ansluta till. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att aktivera den.

Om anslutningen lyckas kommer innehållet från den anslutna enheten att visas på punktdisplayen.

Notera: när Brailliant är parkopplad med en enhet via Bluetooth bör 5 GHz Wi-Fi-anslutning användas för optimal nedladdningshastighet. Användning av 2.4 GHz Wi-Fi-anslutning ger långsammare nedladdning.

6.2. Urklipp i punktdisplayläge

När en textmarkering kopieras eller klipps ut lagras den i ett globalt urklipp och kan klistras in på någon annan plats i enheten. Denna funktion är användbar om du exempelvis önskar kopiera en del ifrån en bok i Victor Reader och sedan klistra in det i ett dokument i Ordbehandlaren.

Det globala urklippet kan också användas när du använder externa enheter parkopplade med Brailliant via USB eller Bluetooth. För närvarande stödjer JAWS och iOS urklipp i

punktdisplayläge. Alla andra skärmläsare har svårigheter att hantera urklippet. När punktdisplaylägets urklipp används finns en begränsning på 360-tecken.

Kopiera en markerad text till en ansluten enhet:

1. Tryck Backsteg + Y för att kopiera markerad text.
2. Gå till platsen där du önskar klistra in informationen på den anslutna enheten.
3. Ange förbikopplings-kommandot Mellanslag + Enter + Punkter 4-5-6. Meddelandet "ange lokalt kommando" visas. Förbikopplings-kommandot låter dig använda några interna funktioner på Braillianten när den är ansluten till en extern enhet, såsom att visa batterinivå eller datum och tid.
4. Tryck Backsteg + V för att klistra in på den anslutna enheten.

6.3. Navigera mellan anslutna enheter

När du har fler än en enhet ansluten till Brailliant kan du växla mellan dessa när som helst.

Växla till annan ansluten enhet genom att trycka på Hemknappen + tumknappen Nästa eller Hemknappen + tumknappen Föregående. Alternativt kan du navigera till en annan ansluten enhet genom att göra följande:

1. Tryck på Hemknappen för att återvända till listan med anslutna enheter.
2. Välj önskad ansluten enhet med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

Notera: När en Bluetooth-enhet är ansluten visas en 8-punkters symbol efter enhetsnamnet. Tryck på enheten för att etablera en anslutning om 8-punkters symbolen ej visas.

Om du har problem med en Bluetooth-anslutning kan du klicka på Återanslut enheter. Detta växlar Bluetooth Av och sedan På samt återansluter dina enheter. Använd detta alternativ om du inte får någon punktskrift vid anslutning till en enhet.

6.4. USB-anslutningar i punktdisplayläge

När Brailliant används är det möjligt att automatiskt bli informerad om en USB-anslutning när en enhet ansluts via USB samt växla till punktdisplayläge.

För att aktivera funktionen Fråga om USB:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar och tryck Enter.
3. Välj Användaralternativ och tryck Enter.
4. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når alternativet Fråga om USB.
5. Tryck Enter för att aktivera funktionen. Tryck Enter igen för att inaktivera den.

Notera: Om fråga om USB är aktiverat samt punktdisplayen USB-ansluten till en dator kommer punktdisplayläget automatiskt att aktiveras vid uppstart.

6.5. Inaktivera punkttangentbord i punktdisplayläge

När Brailliant används i punktdisplayläge är det möjligt att inaktivera punkttangentbordet i enheten.

Inaktivera punkttangentbordet i punktdisplayläget:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar och tryck Enter.
3. Välj Användaralternativ och tryck Enter.
4. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når Stäng av punktinmatning i punktdisplayläge.
5. Tryck Enter för att inaktivera punkttangentbordet i punktdisplayläget. Tryck Enter igen för att aktivera det.

Notera att tumknapparna och kommandoknappar på Braillianten fortfarande kommer att fungera när punkttangentbordet är inaktiverat.

7. Använda Filhanteraren

Med Filhanteraren kan du utforska, ta bort, kopiera och utföra alla filoperationer du kan förvänta dig från en filhanterare på en dator.

Tryck tumknappen Nästa tills du når Filhanteraren för att öppna den.

Alternativt kan du öppna Filhanteraren genom att trycka F i Huvudmenyn och sedan trycka Enter eller en cursor-routingknapp.

7.1. Utforska filer

Du kan bläddra bland filer och mappar med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa. Mappnamn har en 8-punkters symbol framför namnet. Tryck Enter på en mapp för att öppna den.

Tryck Mellanslag + E för att återvända till övermappen. Alternativt kan du flytta till objektet Tillbaka och sedan trycka Enter eller en cursor-routingknapp.

7.1.1. Välj en enhet i Filhanteraren

Innan du använder Filhanteraren måste du välja enheten du önskar komma åt: interna minnet eller en USB-enhet.

Välj enhet genom att trycka Mellanslag + D för att visa en lista med tillgängliga enheter. Stega igenom listan med tumknapparna Föregående och Nästa och tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att bekräfta ditt val.

Du placeras i rotmappen på den valda enheten.

Tryck Mellanslag + D när som helst för att återvända till val av enhet.

7.1.2. Visa information om filer, mappar eller enheter

För att få ytterligare information om en fil eller mapp väljer du den med tumknapparna Föregående och Nästa samt trycker sedan Mellanslag + I.

Du kan nu stega genom en lista med information om filen eller mappen med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa. Använd tumknapparna Vänster och Höger för att flytta åt vänster eller höger i texten.

Kortkommandot Mellanslag + I kan användas för att visa lagringsminne på en enhet.

7.1.3. Visa aktuell sökväg för fil

Funktionen Var är jag visar information om sökvägen till den aktuella platsen på punktdisplayen.

Visa aktuell filsökväg genom att trycka Mellanslag + Punkter 1-5-6.

7.1.4. Sök filer och mappar

Du kan snabbt komma åt en viss fil eller mapp genom att utföra en sökning i Filhanteraren.

Söka fil eller mapp i Filhanteraren:

1. Tryck Mellanslag + F.
2. Skriv in namnet för filen eller mappen.
3. Tryck Enter.
En lista med filer och mappar som stämmer in på sökningen visas på punktdisplayen.
4. Tryck Mellanslag + E för att stänga sökresultaten.

7.1.5. Sortera filer och mappar

Som standard sorteras filer och mappar i alfabetisk ordning. Du kan emellertid sortera filer och mappar på andra sätt.

Ändra sorteringsalternativ för filer och mappar.

1. Tryck Mellanslag + V.
Brilliant visar en lista med möjliga alternativ: Namn, Datum, Storlek och Typ.
2. Stega i listan med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att aktivera sorteringsalternativet som önskas.

Val av samma sorteringsalternativ som redan är aktivt ändrar sorteringsordningen från stigande till fallande samt tillbaka igen om alternativet väljs ytterligare en gång.

7.2. Redigera filer och mappar

Filhanteraren i Brailiant låter dig arbeta med filer på liknande sätt som i en dator eller surfplatta.

7.2.1. Skapa en ny mapp

I Filhanteraren går det att skapa nya mappar.

Det enklaste sättet att göra detta är att trycka Mellanslag + N och ange namnet för den nya mappen i det tomma fältet. Tryck sedan Enter för att skapa den.

7.2.2. Byt namn på filer eller mappar

Byt namn på fil eller mapp:

1. Välj filen eller mappen som ska byta namn med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
2. Tryck Backsteg + R.
3. Skriv in ett nytt namn för filen eller mappen.
4. Tryck Enter för att döpa om filen eller mappen.

Notera: Filnamnet måste vara unikt i den aktuella mappen och endast en fil kan byta namn åt gången.

7.2.3. Kopiera, klippa ut och klistra in filer eller mappar

Kopiera och klippa ut filer och mappar

För att kopiera en enskild fil eller mapp väljer du den med tumknapparna Föregående och Nästa samt trycker sedan Backsteg + Y.

För att klippa ut en enskild fil eller mapp väljer du den med tumknapparna Föregående och Nästa samt trycker sedan Backsteg + X.

Kopiera eller klippa ut flera filer eller mappar:

1. Välj filen eller mappen som ska kopieras med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
2. Tryck Backsteg + L för att markera filen eller mappen.
3. Upprepa detta steg för att markera alla filer eller mappar som ska kopieras.
4. Tryck Backsteg + Y för att kopiera **eller** Backsteg + X för att klippa ut.
Filerna eller mapparna är nu kopierade/urklippta till urklipp och reda att klistras in.

Klistra in filer och mappar

För att klistra in kopierade eller urklippta filer eller mappar navigerar du till platsen där det ska klistras in och trycker sedan Backsteg + V.

7.2.4. Ta bort filer eller mappar

För att ta bort en enskild fil eller mapp väljer du den med tumknapparna Föregående och Nästa samt trycker sedan Backsteg + punkter 2-3-5-6.

Ta bort flera filer eller mappar:

1. Välj filen eller mappen som ska tas bort med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.
2. Tryck Backsteg + L för att markera den valda filen eller mappen.
3. Upprepa detta steg för att markera alla filer eller mappar som ska tas bort.
4. När de markerade filerna eller mapparna är klara för borttagning trycker du Backsteg + punkter 2-3-5-6.

Notera: Brailiant frågar ifall du är säker på att du vill ta bort filer och/eller mappar **endast** när alternativet Godkänn radering är inställt på På i Alternativmenyn. Välj Ja med tumknapparna Föregående och Nästa och tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att bekräfta borttagningen. Gå till [avsnittet Alternativmeny](#) för mer information om inställningen Godkänn radering.

7.3. Kommandotabell för Filhanteraren

Kommandon för Filhanteraren finns i Tabell 6.

Tabell 6: Kommandon i Filhanteraren

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Skapa ny mapp	Mellanslag + N
Fil-/enhetsinformation	Mellanslag + I
Markera/avmarkera	Backsteg + L
Markera/avmarkera alla	Enter + punkter 1-2-3-4-5-6
Byt namn på fil	Backsteg + R
Ta bort fil	Backsteg + punkter 2-3-5-6
Kopiera fil	Backsteg + Y
Klipp ut fil	Backsteg + X
Klistra in fil	Backsteg + V
Sök fil	Mellanslag + F
Sortera filer	Mellanslag + V
Var är jag	Mellanslag + punkter 1-5-6
Välj enhet	Mellanslag + D
Gå upp en mappnivå	Mellanslag + E
Mata ut media	Mellanslag + E

8. Använda Kalkylatorn

Brilliant har en kalkylatorapp med vilken du kan utföra de vanligaste beräkningarna.

Notera: Kalkylatorn stödjer för närvarande endast datapunktskrift.

Öppna Kalkylatorn:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Tryck K **eller** tumknapparna Föregående och Nästa tills du når Kalkylatorn.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

8.1. Använda kalkylatorn

Skriv det fullständiga uttrycket och tryck sedan Enter för att visa resultatet.

Skriv exempelvis uttrycket $20-(6+8)$ (utan mellanslag). Tryck Enter och Brilliant visar svaret 6.

Tryck Mellanslag + Punkter 3-5-6 för att rensa.

För att lägga till operatörer såsom + eller - öppnar du Snabbmenyn med Mellanslag + M. Se [tabellen med kommandon för Kalkylatorn](#), för en komplett lista över kommandon och operatörer i Kalkylatorn.

8.2. Tabell kommandon för Kalkylatorn

Kommandon för Kalkylatorn finns i Tabell 7.

Tabell 7: Kommandon i kalkylatorn med datapunktskrift

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Plus	Punkter 2-5-6
Minus	Punkter 3-6
Multiplitera	Punkter 3-5
Dividera	Punkter 3-4
Lika med	Enter
Rensa	Mellanslag + punkter 3-5-6
Decimalpunkt	Punkt 2
Procent	Punkter 4-6-7-8
Kvadratrot	Mellanslag + punkter 3-4-5
Pi	Mellanslag + Y

9. Använda funktionen för Datum och tid

Brilliant har en funktion som visar aktuellt datum och tid.

Öppna datum och tid:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Tryck på tumknapparna Föregående och Nästa tills du når menyalternativet Datum och tid.
3. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp.

9.1. Visa datum och tid

När du öppnar applikationen Datum och tid visar Braillianten den aktuella tiden.

Flytta till höger en gång med Höger tumknapp för att visa datum.

Flytta vänster med Vänster tumknapp för att återvända till tid.

För att snabbt visa datum och tid var som helst i Brailliant trycker du Enter + T för tid samt Enter + D för datum.

9.2. Ställa in datum och tid

Tryck Mellanslag + M i applikationen Datum och tid för att ändra datum och tid.

En undermeny med följande alternativ visas.

Ändra tid: Skriv in aktuell timme innanför hakparenteserna och tryck Enter. Upprepa för minuter.

Ändra datum: Skriv in aktuellt år innanför hakparenteserna och tryck Enter. Upprepa för månad och dag.

Sommartid: Tryck Enter för att aktivera eller inaktivera Sommartid.

Tidsformat: Tryck Enter för att ändra mellan 12- och 24-timmarsformat.

Datumformat: Välj önskat datumformat (listas nedan) och tryck Enter.

- Språkstandard
- DD, MM
- DD, MM, ÅÅÅÅ
- MM, DD
- MM, DD, ÅÅÅÅ
- ÅÅÅÅ, MM, DD

10. Inställningsmenyn

I Inställningsmenyn kan du ändra inställningar i Brailliant och den innehåller följande menyalternativ:

- Användaralternativ
- Språkprofil

- WiFi
- Bluetooth
- Anpassa huvudmeny
- Ändra språk
- Aktivera tentaläge
- Mjukvaruuppdatering
- Om

Gör så här för att öppna Inställningar:

1. Tryck på Hemknappen för att öppna Huvudmenyn.
2. Tryck tumknappen Nästa tills du når Inställningar eller tryck 'I' och sedan Enter eller en cursor-routingknapp.

Alternativt kommer du åt menyn Inställningar genom att trycka Mellanslag + O.

10.1. Användaralternativ

Användaralternativ finns i tabell 8.

Tabell 8: Inställningar under Användaralternativ

Inställningar	Alternativ/Resultat
Flygplansläge	På eller Av. När det är På är all trådlös kommunikation inaktiverad
Formatmarkörer	På eller Av. När det är av är alla formatmarkeringar dolda
Visa markör	På eller Av
Blinkande markör	På eller Av. När det är På blinkar markören med 0,5 sekunders frekvens.
Meddelandetid	1-30 sekunder: tiden som meddelanden visas
Insomningstid	Tid i minuter. 0 betyder inaktiverat.
Dela ej ord	På eller Av
Dölj tomma rader	På eller Av. När är På visas inte tomma rader
Godkänn radering	På eller Av. Brailiant ber dig bekräfta vid filborttagning
Vibrationer	På eller Av. När det är På vibrerar Brailiant
Pip	På eller Av. När det är På piper Brailiant
Tumknappar	Mappa knapparna Föregående, Nästa, Rulla vänster och Rulla höger till önskade kommandon.
Notiser, BT&WiFi	Aktivera eller inaktivera meddelanden om anslutning till trådlöst nätverk eller Bluetooth
Enhandsläge	På eller Av. När det är På kan punktknapparna tryckas in och släppas en och en. Punktkombinationen bekräftas först när du trycker Mellanslag.

Inställningar	Alternativ/Resultat
Starta i punktdisplayläge	På eller Av. När det är På startar enheten automatiskt i punktdisplayläge vid omstart.
Fråga om USB	På eller Av. När det är På, och efter enheten identifierar en USB-anslutning, kommer du att få frågan om du vill ansluta i punktdisplayläge.
Stäng av punktinmatning i punktdisplayläge	På eller Av. När det är På inaktiveras punkt tangentbordet i punktdisplayläget.

10.2. Lägga till, konfigurera och ta bort språkprofiler

Menyn Språkprofiler listar alla tillgängliga språkprofiler i din Brailiant. Den aktiva språkprofilen är understruken med punkterna 7 och 9 på punktraden.

Stega igenom listan med tillgängliga språkprofiler med tumknapparna Föregående och Nästa och tryck sedan Enter eller en cursor-routingknapp för att välja en språkprofil.

10.2.1. Lägga till en språkprofil

Välj Lägga till profil för att lägga till en språkprofil och avsluta med Enter eller en cursor-routingknapp.

Du uppmanas att ange följande:

Profilnamn: Ange namnet för profilen inom hakparenteserna och tryck sedan Enter.

Punktnivå: Välj mellan Litterär punktskrift, Förkortad punktskrift och Datorpunktskrift och tryck sedan Enter. Notera att Brailiant ger dig möjlighet att dölja Förkortad och/eller Datorpunktskrift när du växlar mellan punktnivåer.

Datorpunktskrift: Välj punkttabell för datorpunktskrift och tryck sedan Enter. Välj ingen för att undvika växling till Datorpunktskrift.

Litterär punktskrift: Välj punkttabell för litterär punktskrift och tryck sedan Enter.

Förkortad punktskrift: Välj punkttabell för förkortad punktskrift och tryck sedan Enter. Välj ingen för att undvika växling till Förkortad punktskrift.

Spara konfiguration: Tryck Enter för att spara konfigurationen.

Den nya språkprofilen finns nu tillgänglig i inställningsmenyn för Språkprofiler.

10.2.2. Ändra eller ta bort en språkprofil

Ändra eller ta bort en språkprofil:

1. Välj alternativet Språkprofil i Inställningsmenyn.
2. Stega bland de tillgängliga Språkprofilerna med hjälp av tumknapparna Föregående och Nästa.

3. Tryck Mellanslag + M för att aktivera Snabbmenyn.
4. Välj Konfigurera profil eller Ta bort profil samt tryck Enter.
5. Alternativt kan du välja Konfigurera profil samt Ta bort profil i Språkprofilmenyn.

10.3. Använda Wi-Fi eller Bluetooth

Brilliant BI 40X är kompatibel med 2.4 GHz och 5 GHz Wi-Fi-nätverk.

10.3.1. Anslut till ett Wi-Fi-nätverk.

Välj Ny anslutning i Wi-Fi-menyn och tryck sedan Enter eller en cursor-routingknapp för att aktivera.

Det finns tre val för anslutning:

Sök efter SSID: Välj detta alternativ för att upptäcka tillgängliga nätverk i närheten. När Brilliant har letat klart visas en lista med alla nätverk som hittades.

Tryck Enter eller en cursor-routingknapp för att välja ett nätverk. Ange lösenord och tryck Enter för att slutföra anslutningen.

WPS-anslutning: Välj detta alternativ för att etablera en Wi-Fi-anslutning med hjälp av WPS. Brilliant visar "laddar..." i ungefär 30 sekunder. Tryck på WPS-knappen på nätverkets router för att göra det möjligt för den att upptäcka nya enheter. Efter några sekunder är du automatiskt ansluten till nätverket.

Manuell anslutning: Välj detta alternativ för att ange nätverkets SSID och lösenord manuellt. Tryck Enter när det är klart.

10.3.2. Tabell med inställningar för Wi-Fi

Tillgängliga inställningar för Wi-Fi finns i Tabell 9.

Tabell 9: Inställningar för Wi-Fi

Inställningar	Alternativ/Resultat
Wifi	Tryck Enter för att aktivera eller inaktivera Wi-Fi
Status	Visar information om den aktuella statusen för Wi-Fi
Ny anslutning	Tryck Enter för att skapa en ny Wi-Fi-anslutning.
Aktivera anslutning	Anslut till ett Wi-Fi-nätverk som är känt av enheten
Ta bort anslutning	Får enheten att glömma ett känt Wi-Fi-nätverk
Nätverksinställningar	Ändra avancerade nätverksinställningar såsom Läge, IP, Nätmask, Gateway och DNS
Importera wifi-konfiguration	Importerar nätverksinformation för Wi-Fi från en fil

10.4. Välja alternativ för Bluetooth

Följande alternativ för Bluetooth finns tillgängliga i Brailliant BI 40X.

Bluetooth-läge: På eller Av

Anslut enhet: Anslut Brailliant till en enhet som är parkopplad via Bluetooth.

Koppla från enhet: Kopplar ifrån den aktiva Bluetooth-anlutningen.

Glöm enhet: Får din enhet att glömma en Bluetooth-enhet.

11. Anpassa huvudmeny i KeySoft

Denna funktion låter dig anpassa huvudmenyn i Brailliant genom att ta bort de menyval du ej har nytta av. Funktionen är användbar för nybörjare som vill förenkla användningen av enheten.

Gör så här för att anpassa Huvudmenyn:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar.
3. Tryck Enter.
4. Gå till Anpassa huvudmeny:
5. Tryck Enter.
6. En lista med menyvalen på Huvudmenyn visas. Gå till det val du önskar ta bort från menyn och tryck Enter för att växla den till av. Tryck Enter igen för att växla den till på.
7. Tryck på Spara för att aktivera förändringarna.

12. Enhandsläge

Brailliant kan användas i enhandsläge som gör det möjligt att utföra kortkommandon med endast en hand. När enhandsläget är aktiverat ändras sättet som punktinmatning och kommandon utförs. Varje knapp kan tryckas in och släppas en och en. Punktkombinationen bekräftas först när Mellanslag trycks. För att snabbt lägga in ett mellanslag mellan två ord trycker du på Mellanslag två gånger.

Samma logik används när du utför punktkommandon. För punktkommandon som innefattar Mellanslag, såsom Gå överst (standardkommandot är Mellanslag + Punkter 1, 2, 3): tryck Mellanslag sedan punkt 1, sedan punkt 2, sedan punkt 3 samt avsluta med Mellanslag.

Notera: användningen av tumknapparna och cursor-routingknapparna i enhandsläget fungerar på samma sätt som i standardläget.

Aktivera/inaktivera enhandsläget:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar och tryck Enter.

3. Välj Användaralternativ och tryck Enter.
4. Använd tumknapparna Föregående och Nästa tills du når alternativet Enhandsläge.
5. Tryck Enter för att aktivera Enhandsläget, tryck Enter igen för att inaktivera det.

13. Ändra språk

Ändra systemspråket för Brailiant BI 40X:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar.
3. Välj Ändra språk.
4. Välj Språk och tryck Enter. En lista visas på punktdisplayen.
5. Välj önskat språk i listan.
6. Välj Stäng.
7. Du uppmanas att välja alternativet Ersätt standardprofil för språk. Om du klickar på Ok kommer en ny språkprofil att skapas med en Punkttabell som tillåter läsning av punktskrift i det valda språket. Tryck Avbryt ifall du önskar behålla den aktuella språkprofilen.
8. Starta om Brailiant (när enheten uppmanar dig) för att aktivera ändringarna.

14. Visa och använd Onlinetjänster

Menyn Onlinetjänster innehåller de onlinebibliotek som inkluderas i Brailiant. Onlinetjänster är prenumerationsbaserade och kräver att du anger kontodetaljer.

Notera: Försäkra dig om att du har en Internetanslutning med Brailiant innan du använder Onlinetjänster.

Böcker från onlinebibliotek laddas ned i mappen Online-books i Brailiant. Alla böcker finns i Huvudboklistan i applikationen Victor Reader.

14.1. Aktivera Bookshare och ladda ner böcker

Onlinebiblioteket Bookshare® innehåller upphovsrättsskyddat material för personer med kvalificerade lässvårigheter. Mer information om Bookshare finns här

<http://www.bookshare.org>.

Du kan söka efter samt ladda ner böcker trådlöst till Brailiant. Tidningar och tidskrifter är för tillfället ej tillgängliga vid onlinesökning.

Aktivera tjänsten Bookshare och ladda ner en bok:

1. Ange e-postadress och lösenord för ditt Bookshare-konto.
2. Välj önskat bokformat (Daisy eller BRF).
3. Sök efter böcker via titel, författare, textsökning och/eller utforska efter kategori. Du kan även söka efter de senast tillagda böckerna eller de mest populära böckerna.

4. Tryck Enter eller en cursor-routingknapp på en bok för att få mer information.
5. Använd tumknapparna Föregående och Nästa för att navigera mellan titel, författare och bokbeskrivning.
6. Tryck Enter på alternativet ladda ner för att ladda ner boken till Brailliant.

14.2. Konfigurera, hantera och synkronisera ett NFB Newsline-konto

Om du har ett Newsline®-konto kan du ansluta med Brailliant till ditt konto och ladda ner material från NFB för uppläsning i appen Victor Reader.

Konfigurera konto: Skriv in dina inloggningsuppgifter för NFB Newsline, välj uppdateringsfrekvens och bestäm huruvida din Brailliant ska behålla eller ta bort gamla utgåvor.

Hantera publikationer: Välj vilket material du vill prenumerera på. Material du prenumererar på är understruket.

Synkronisera innehåll nu: Ladda ner senaste utgåvorna av materialet du prenumererar på.

14.3. NLS Bard

Brailliant kan ansluta direkt till BARD. Det går att visa nedladdade böcker från listan med de mest populära böckerna samt listan med senaste böcker och tidskrifter. Det går att utforska ämneskategorier och söka efter samlingar. Det går även att ladda ner böcker och tidskrifter från önskelistan samt lägga till och ta bort objekt från den. Innan BARD kan användas måste en anslutning till ett Wi-Fi-nätverk upprättas (se [Ansluta till ett WiFi-nätverk](#) för detaljerad beskrivning) samt inloggning till ett BARD-konto.

14.3.1. Ansluta till BARD för första gången

Välj NLS BARD i menyn Onlinetjänster. Första gången detta görs ombeds du att skriva in ditt användarnamn och lösenord för BARD. Det går inte att logga in med ett temporärt lösenord. Om du har ett temporärt lösenord måste du först använda en webbläsare för att skapa ett permanent lösenord och sedan logga in med det i Braillianten.

Tryck Enter efter att användarnamnet skrivits in. Ett lösenord efterfrågas. Tryck Enter efter detta har skrivits in. En kort stund visas meddelandet "laddar..." följt av "inloggning lyckades".

Efter en lyckad inloggning till BARD kommer Brailliant alltid att visa meddelandet "inloggning lyckades" samt första objektet i menyn när NLS BARD startas.

14.3.2. Ladda ner böcker och tidskrifter från BARD

Menyn i NLS BARD innehåller följande alternativ:

- Mest populär
- Senaste böcker

- Senaste tidskrifter
- Utforska kategorier
- Utforska tidskrifter
- Sök samling
- Önskelista
- Nedladdningshistorik
- Ta bort konto

Varje menyalternativ visar en lista med böcker eller tidskrifter. Tryck Enter på en bok för att få mer information. Använd tumknapparna Upp och Ner för att navigera mellan titel, författare och bokbeskrivning. Tryck Enter på alternativet ladda ner om du vill ladda ner boken till Brailiant.

14.3.3. Läsa en nedladdad bok

Så snart nedladdade böcker eller tidskrifter finns tillgängliga går det att läsa dessa eller ladda ner ytterligare titlar. För att läsa en titel, aktivera först huvudmenyn på Hemknappen. Navigera till Victor Reader och tryck Enter. Tryck Enter på Boklistan. Här finns de nedladdade titlarna. Tryck Enter på titeln du önskar läsa och början av boken presenteras.

15. Tentamensläge

Tentamensläget används för att blockera vissa funktioner och applikationer i Brailianten under en viss tidsperiod. När Tentamensläget är aktivt har du endast tillgång till Punktdisplayfunktioner. Notera att Bluetooth inaktiveras i Tentamensläget och Punktdisplayläget är endast möjligt via USB-anslutning. Alla andra applikationer och användningen av extern media (USB-enhet eller SD-kort) är blockerat när detta läge är aktivt.

När Tentamensläget aktiveras uppmanas du att ange en tid mellan 1 och 360 minuter (6 timmar) samt ett lösenord för att stänga av Tentamensläget.

För att låsa upp enheten måste du antingen vänta den angivna tiden eller skriva in det angivna lösenordet.

Vid omstart av enheten kommer den automatiskt att återgå till Tentamensläget ifall tidsperioden ej har löpt ut.

Aktivera Tentamensläge:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar.
3. Tryck Enter.
4. Gå till Aktivera tentaläge.
5. Tryck Enter.
6. Ange önskad tid (mellan 1 och 360 minuter).
7. Ange önskat lösenord för att aktivera Tentamensläge.
8. Tryck Ok.

16. Tekniska specifikationer

16.1. Navigationskomponenter

- 4 tumknappar
- 8-knappars punkttangentbord
- 2 mellanslagsknappar
- Cursor-routingknappar
- 6 kommandoknappar

16.2. Batterier med lång batteritid

- Fungerar i upp till 15 timmar
- Laddning via dator med USB-kabel
- Automatisk avstängning
- Lithium-jon-batteri
- Kompatibel med standard USB-strömadaptrar

16.3. Anslutning

- USB 2.0
- Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz
- Bluetooth V5

16.4. Dimensioner och vikt

Dimensioner: 305 mm x 90 mm x 21,8 mm

Vikt: 720 g

17. Uppdatera Brailiant BI 40X

17.1. Uppdatera Brailiant BI 40X manuellt

När enheten är ansluten till Internet kan du manuellt kontrollera ifall en uppdatering finns tillgänglig.

Sök manuellt efter en uppdatering:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj Inställningar.
3. Tryck Enter.
4. Välj Mjukvaruuppdatering.
5. Tryck Enter.
6. Välj Sök uppdatering.
7. Tryck Enter.

Om det finns en ny uppdatering, tryck på tumknapparna Föregående eller Nästa för att ladda ner uppdateringen nu eller bli påmind senare. Punktdisplayen går att använda när uppdateringen laddas ner.

Notera att enheten måste vara ansluten med nätadapter samt att batterinivån måste vara mer än 50% för att uppdateringen ska genomföras.

Efter några minuter meddelar Brailliant att du kan installera den nedladdade uppdateringen. Välj OK för att installera den. Brailliant startar om och en förloppsindikator visas på punktdisplayen.

Vid slutet av uppdateringsprocessen reses alla 8 punkter i de 40 cellerna en cell i taget och sedan stänger enheten av.

17.2. Uppdatera Brailliant BI 40X via USB

Du kan uppdatera Brailliant genom att ladda ner en uppdateringsfil via en dator och överföra den till ett USB-minne.

Uppdatera Brailliant via USB-minne:

1. Anslut USB-minnet till datorn.
2. Överför uppdateringsfilen till enheten. Notera att uppdateringsfilen måste placeras i roten på USB-minnet.
3. Sätt in USB-minnet med uppdateringsfilen i din Brailliant. Försäkra dig om att Brailliant är igång.
4. När Brailliant upptäcker uppdateringsfilen på USB-minnet kommer punktdisplayen att meddela att en uppdatering är tillgänglig för installation.
5. Tryck tumknappen Nästa för att gå till alternativet OK och tryck Enter för att aktivera uppdateringen. Enheten startar om för att slutföra uppdateringen.

Den senaste uppdateringen finns alltid tillgänglig på produktsidan för Brailliant BI 40X.

17.3. Funktionen Automatisk sökning efter uppdateringar

Som standard är funktionen för automatisk sökning efter uppdateringar aktiverad. När enheten är ansluten till Internet kontrollerar den regelbundet om det finns en ny uppdatering tillgänglig för nedladdning. Om en ny uppdatering finns tillgänglig frågar Brailliant om du vill ladda ner uppdateringen.

Aktivera/inaktivera funktionen automatisk sökning efter uppdateringar:

1. Gå till Huvudmenyn.
2. Välj inställningar.
3. Tryck Enter.
4. Välj Mjukvaruuppdatering.
5. Tryck Enter.

6. Välj Sök automatiskt.
7. Tryck Enter för att aktivera/inaktivera denna funktion.

Notera att när detta är aktiverat kommer Brailiant att kontrollera om en ny uppdatering är tillgänglig var 23:e timme.

18. Rengöring och rekonditionering

För att hålla punktdisplayen ren rekommenderar vi att du torkar av ytan av enheten med jämna mellanrum med hjälp av en fuktig tygbit. Vrid ur tygbiten ordentligt innan så den bara är lätt fuktig. Punktdisplayen kan rengöras med lätt fuktad trasa och milda rengöringsmedel. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel.

Alkoholbaserade desinfektionsmedel kan användas vid mer grundläggande rengöring såsom rekonditionering. Även här är det viktigt att inte applicera för mycket vätska utan endast använda lätt fuktad tygbit.

19. Registrerade varumärken

macOS är ett registrerat varumärke tillhörande Apple Inc.

JAWS är ett registrerat varumärke tillhörande Freedom Scientific, Inc i USA och andra länder.

Bookshare® är ett registrerat varumärke tillhörande Beneficent Technology, Inc.

NFB Newline är ett registrerat varumärke tillhörande National Federation of the Blind.

Bluetooth är ett registrerat varumärke tillhörande Bluetooth SIG, Inc.

IOS är ett registrerat varumärke tillhörande Cisco i USA och andra länder och används under licens.

Alla andra varumärken är egendom tillhörande respektive ägare.

20. Licensavtal för slutanvändare

Genom att använda denna produkt (Brailiant BI 40X) binder du dig till att följa nedanstående termer.

1. Licenserkännande. HumanWare beviljar slutanvändaren en icke-exklusiv, icke-överförbar rättighet och licens för att använda mjukvaran i denna produkt.
2. Äganderätt till mjukvaran. Slut användaren bekräftar att HumanWare behåller alla rättigheter, titel och intressen i och till originalet samt kopior av mjukvaran som finns i

denna produkt. Slutanvändaren godkänner att inte: modifiera, porta, översätta, dekompilera, plocka isär eller publicera mjukvaran i denna produkt på något sätt.

21. Garanti

Tillverkarens garantier.

Detta är en högkvalitativ produkt, byggd och paketerad med omsorg. Alla enheter och komponenter har garanti i två (2) år från funktionella defekter i alla länder.

Garantin täcker alla delar (förutom batteri) samt arbetskostnad. Om något fel uppstår, kontakta din lokala distributör eller tillverkaren för teknisk assistans.

Notera: Garantivillkoren kan periodvis förändras, besök vår webbsida för den senaste informationen.

Villkor och begränsningar:

Förvara ditt originalkvitto för inköp på en säker plats för framtida användning i service- och garantiärenden. Var god behåll originalkvittot. Om enheten måste återsändas, var god använd originalförpackningen. Denna garanti gäller i alla fall där skadan ej är ett resultat av felaktig användning, oaktsam hantering, misskötsel eller Guds inverkan.

Bilaga A - Sammanställning av kommandon

Snabbkommandon/Knappkombinationer

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Aktivera valt objekt	Enter eller cursor-routingknapp
Escape eller Tillbaka	Mellanslag + E
Föregående objekt	tumknapp Föregående, C1 eller Mellanslag + punkt 1
Nästa objekt	tumknapp Nästa, C3 eller Mellanslag + punkt 4
Hoppa till något objekt i en lista	Skriv in första bokstaven för det önskade objektet eller appen
Rulla vänster och höger	Vänster och Höger tumknapp eller C2 (rulla vänster) och C5 (rulla höger)
Gå överst	Mellanslag + punkter 1-2-3
Gå nederst	Mellanslag + punkter 4-5-6
Växla punktskriftnivå	Backsteg + G
Växla språkprofil	Enter + L eller C4
Batterinivå	Enter + P
Snabbmeny	Mellanslag + M
Huvudmeny	Mellanslag + Punkter 1-2-3-4-5-6 eller Hemknappen
Systeminformation	Mellanslag + I
Tid	Enter + T
Datum	Enter + D
Mata ut media	Enter + E
Inställningar	Mellanslag + O
Snabbanteckning	Backsteg + N
Snabb punktanteckning	Backsteg + B

Kommandon för Ordbehandlaren

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Aktivera redigeringsläge	Enter eller en cursor-routingknapp
Lämna redigeringsläge	Mellanslag + E
Skapa en fil	Backsteg + N
Öppna fil	Backsteg + O

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Spara	Mellanslag + S
Spara som	Backsteg + S
Sök	Mellanslag + F
Sök nästa	Mellanslag + N
Sök föregående	Mellanslag + P
Ersätt	Backsteg + F
Start/slut på markering	Enter + S
Markera allt	Enter + punkter 1-2-3-4-5-6
Kopiera	Backsteg + Y
Klipp ut	Backsteg + X
Klistra in	Backsteg + V
Radera föregående ord	Backsteg + punkt 2
Radera aktuellt ord	Mellanslag + punkter 2-5
Radera föregående tecken	Backsteg
Flytta till nästa redigeringsruta vid redigering	Enter
Flytta till nästa redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Nästa
Flytta till föregående redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Föregående
Flytta infogningspunkt till början av textfält	Mellanslag + punkter 1-2-3
Flytta infogningspunkt till slutet av textfält	Mellanslag + punkter 4-5-6
Starta automatisk rullning	Enter + punkter 1-2-4-5-6
Öka rullningshastighet	Enter + punkt 6
Minska rullningshastighet	Enter + punkt 3
Växla läsläge	Mellanslag + X
Menyn Bokmärke	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Lägga in ett Snabbokmärke	Enter + B

Kommandon för Punktordbehandlaren

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Aktivera redigeringsläge	Enter eller en cursor-routingknapp

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Lämna redigeringsläge	Mellanslag + E
Skapa en punktfil	Backsteg + B
Öppna punktfil	Backsteg + O
Spara	Mellanslag + S
Spara som	Backsteg + S
Sök	Mellanslag + F
Sök nästa	Mellanslag + N
Sök föregående	Mellanslag + P
Ersätt	Backsteg + F
Start/slut på markering	Enter + S
Markera allt	Enter + Punkter 1-2-3-4-5-6
Kopiera	Backsteg + Y
Klipp ut	Backsteg + X
Klistra in	Backsteg + V
Radera föregående ord	Backsteg + punkt 2
Radera aktuellt ord	Mellanslag + punkter 2-5
Radera föregående tecken	Backsteg
Flytta till nästa redigeringsruta vid redigering	Enter
Flytta till nästa redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Nästa
Flytta till föregående redigeringsruta utan aktiv redigering	Tumknapp Föregående
Flytta infogningspunkt till början av textfält	Mellanslag + punkter 1-2-3
Flytta infogningspunkt till slutet av textfält	Mellanslag + punkter 4-5-6
Starta automatisk rullning	Mellanslag + punkter 1-2-4-5-6
Öka rullningshastighet	Enter + punkt 6
Minska rullningshastighet	Enter + punkt 3
Växla läsläge	Mellanslag + X
Bokmärkesmeny	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Infoga bokmärke	Enter + B

Victor Reader/Läskommandon för textböcker

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Boklista	Mellanslag + B
Bokhantering	Backsteg + M
Gå till menyn Inställningar	Enter + G
Menyn Bokmärke	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Lägga in ett Snabbbokmärke	Enter + B
Visa Markerande bokmärke	Enter + H
Öppna Navigationsnivå	Mellanslag + T
Föregående Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 3
Nästa Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 6
Föregående element	Tumknapp Föregående
Nästa element	Tumknapp Nästa
Starta automatisk rullning	Enter + punkter 1-2-4-5-6
Öka rullningshastighet	Enter + punkt 6
Minska rullningshastighet	Enter + punkt 3
Var är jag	Mellanslag + punkter 1-5-6
Information	Mellanslag + I
Gå till början av boken	Mellanslag + punkter 1-2-3
Gå till slutet av boken	Mellanslag + punkter 4-5-6
Öppna senaste böcker	Enter + R
Sök efter böcker eller text	Mellanslag + F
Sök nästa	Mellanslag + N
Sök föregående	Mellanslag + P
Nästa icke tom rad	Enter + punkt 4
Föregående icke tom rad	Enter + punkt 1
Föregående tecken	Mellanslag + punkt 3
Nästa tecken	Mellanslag + punkt 6
Föregående ord	Mellanslag + punkt 2
Nästa ord	Mellanslag + punkt 5
Föregående stycke	Mellanslag + punkter 2-3
Nästa stycke	Mellanslag + punkter 5-6
Påbörja/avsluta markering	Enter + S

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Markera allt (aktuellt stycke)	Enter + punkter 1-2-3-4-5-6
Kopiera (aktuellt stycke)	Backsteg + Y
Ta bort bok	Backsteg + punkter 2-3-5-6

Victor Reader/Läskommandon för ljudböcker

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Boklista	Mellanslag + B
Bokhantering	Backsteg + M
Gå till menyn Inställningar	Enter + G
Menyn Bokmärke	Enter + M
Gå till bokmärke	Enter + J
Lägga in ett Snabbokmärke	Enter + B
Visa Markerande bokmärke	Enter + H
Öppna Navigationsnivå	Mellanslag + T
Föregående element	Tumknapp Föregående
Nästa element	Tumknapp Nästa
Föregående Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 3
Nästa Navigationsnivå	Backsteg + Punkt 6
Var är jag	Mellanslag + punkter 1-5-6
Information	Mellanslag + I
Gå till början av boken	Mellanslag + punkter 1-2-3
Gå till slutet av boken	Mellanslag + punkter 4-5-6
Öppna senaste böcker	Enter + R
Ta bort bok	Backsteg + Punkter 2-3-5-6
Spela ljudbok	Mellanslag + G
Stoppa uppspelning	Backsteg + Enter
Spola framåt 5 sekunder	Höger tumknapp (enkel tryckning)
Spolar bakåt 5 sekunder	Vänster tumknapp (enkel tryckning)
Spola framåt (längre tidshopp)	Höger tumknapp (tryck ner och håll in)
Spolat bakåt (längre tidshopp)	Vänster tumknapp (tryck ner och håll in)
Öka läshastighet	Enter + punkt 5
Minska läshastighet	Enter + punkt 2

Kommandon i Filhanteraren

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Skapa ny mapp	Mellanslag + N
Fil-/enhetsinformation	Mellanslag + I
Markera/avmarkera	Backsteg + L
Markera/avmarkera alla	Enter + punkter 1-2-3-4-5-6
Byt namn på fil	Backsteg + R
Ta bort fil	Backsteg + punkter 2-3-5-6
Kopiera fil	Backsteg + Y
Klipp ut fil	Backsteg + X
Klistra in fil	Backsteg + V
Sök fil	Mellanslag + F
Sortera filer	Mellanslag + V
Var är jag	Mellanslag + punkter 1-5-6
Välj enhet	Mellanslag + D
Gå upp en mappnivå	Mellanslag + E
Mata ut media	Enter + E

Kommandon i kalkylatorn med datapunktskrift

Funktion	Snabbkommando eller Knappkombination
Plus	Punkter 2-5-6
Minus	Punkter 3-6
Multiplitera	Punkter 3-5
Dividera	Punkter 3-4
Lika med	Enter
Rensa	Mellanslag + punkter 3-5-6
Decimalpunkt	Punkt 2
Procent	Punkter 4-6-7-8
Kvadratrot	Mellanslag + punkter 3-4-5
Pi	Mellanslag + Y

Polar Print

Teknisk hjälp och support
Tel 020-82 69 13

info@polarprint.se
help@polarprint.se

Växel
Tel 010-470 99 00

Huvudkontor, Luleå

Polar Print
Tåggatan 4
973 31 LULEÅ

Umeå

Tvistevägen 47 C
907 36 UMEÅ

Stockholm

Söderarmsvägen 60
121 54 JOHANNESHÖV

Falköping

Rantens Gårds väg 3
521 31 FALKÖPING

Malmö

Gasverksgatan 2
211 29 Malmö

Växjö

Älgvägen 20
352 45 VÄXJÖ